



Contour[®] plus ONE[»]


Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Spárování inteligentního
glukometru **CONTOUR®**
PLUS ONE s aplikací
CONTOUR™ DIABETES



Contour
plus **ONE**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Spárujte svůj **glukometr CONTOUR® PLUS ONE**, s aplikací **CONTOUR™ DIABETES**, aby byly synchronní, kdykoli je k dispozici připojení přes Bluetooth®.

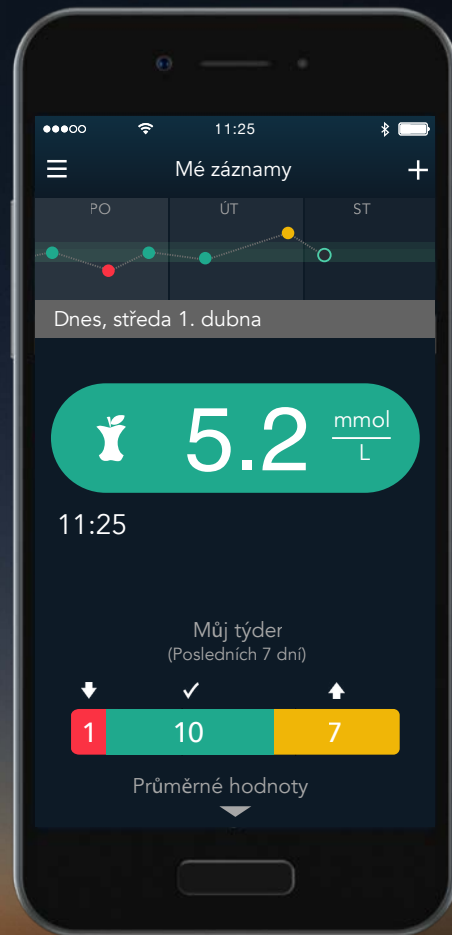


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Spárování glukometru

Před spárováním glukometru **CONTOUR®PLUS ONE** zapněte Bluetooth® na svém mobilním zařízení.

Vstupte do **Nastavení** a následně **Bluetooth®** a klepněte na **přepínač** pro zapnutí Bluetooth®.

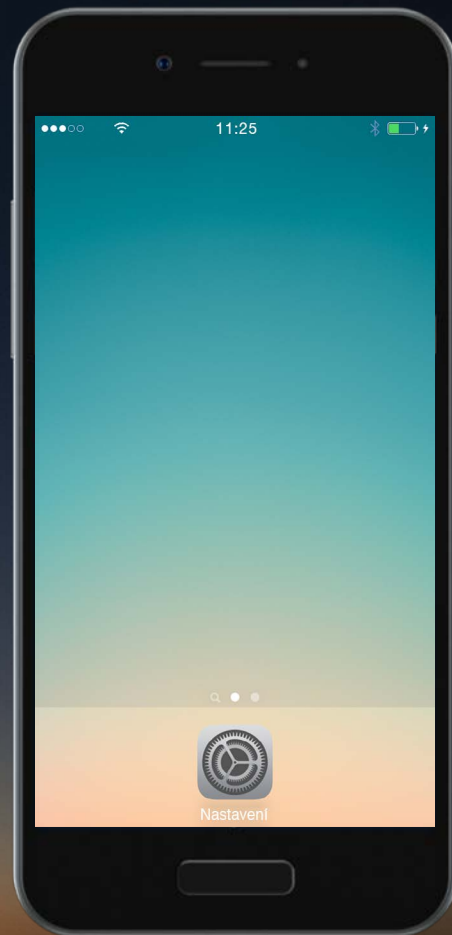


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Spárování glukometru

Před spárováním glukometru **CONTOUR®PLUS ONE** zapněte Bluetooth® na svém mobilním zařízení.

Vstupte do **Nastavení** a následně **Bluetooth®** a klepněte na **přepínač** pro zapnutí Bluetooth®.

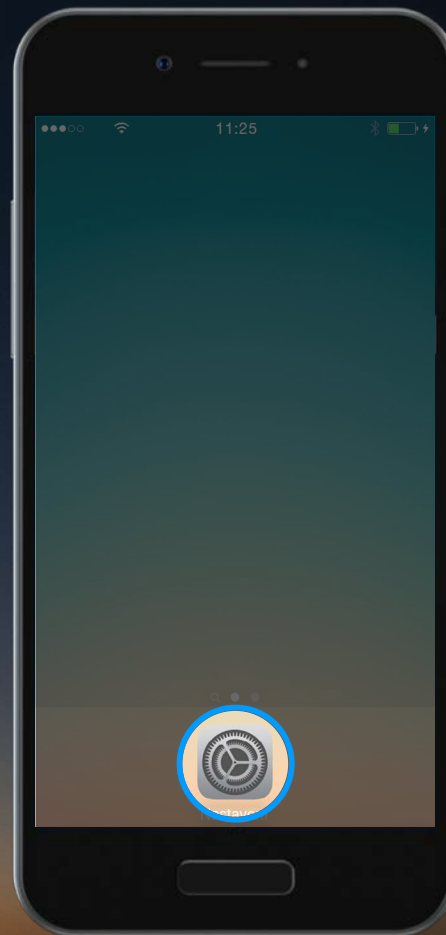


Contour
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Spárování glukometru

Před spárováním glukometru **CONTOUR®PLUS ONE** zapněte Bluetooth® na svém mobilním zařízení.

Vstupte do **Nastavení** a následně **Bluetooth®** a klepněte na **přepínač** pro zapnutí Bluetooth®.

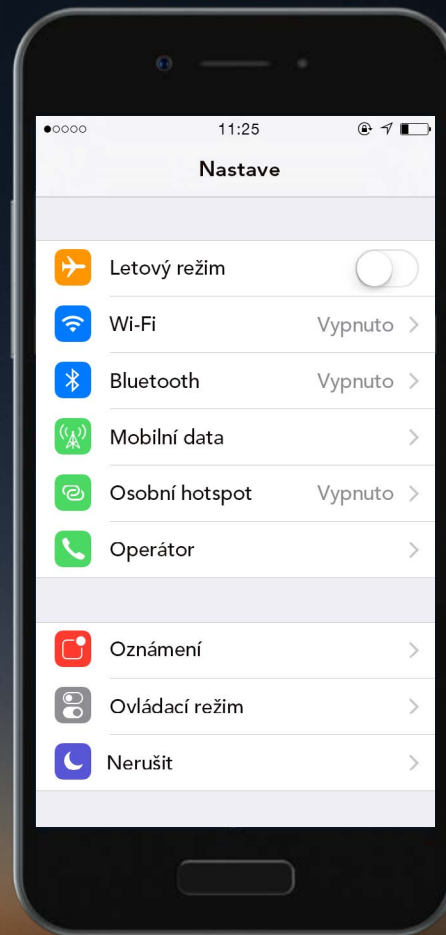


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Spárování glukometru

Před spárováním glukometru **CONTOUR®PLUS ONE** zapněte Bluetooth® na svém mobilním zařízení.

Vstupte do **Nastavení** a následně **Bluetooth®** a klepněte na **přepínač** pro zapnutí Bluetooth®.

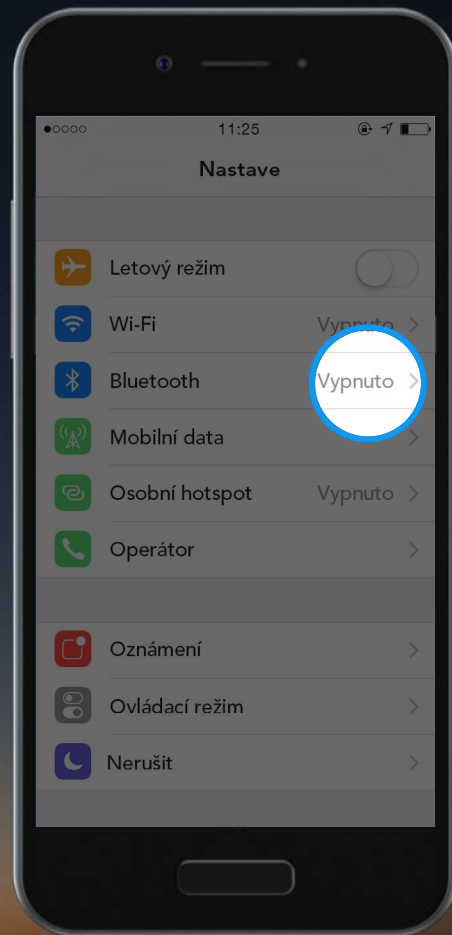


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Spárování glukometru

Před spárováním glukometru **CONTOUR®PLUS ONE** zapněte Bluetooth® na svém mobilním zařízení.

Vstupte do **Nastavení** a následně **Bluetooth®** a klepněte na **přepínač** pro zapnutí Bluetooth®.

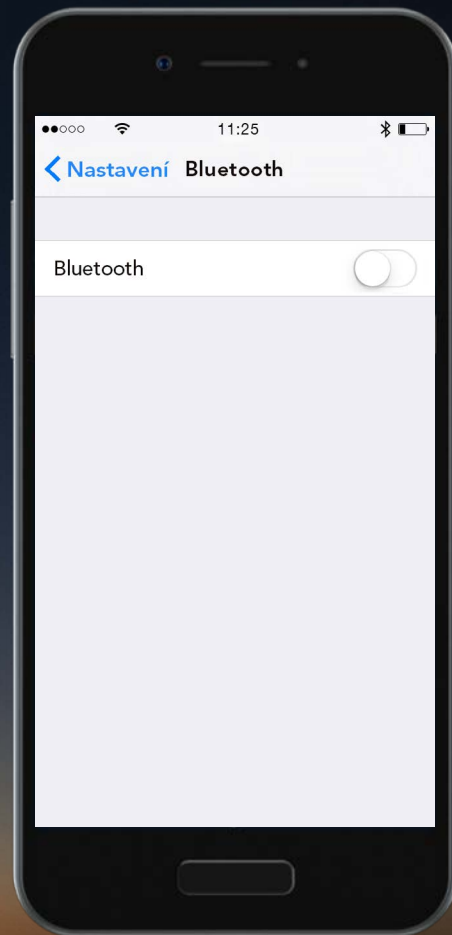


Contour
plus **ONE**»
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

1.

Spárování glukometru

Před spárováním glukometru **CONTOUR[®]PLUS ONE** zapněte Bluetooth[®] na svém mobilním zařízení.

Vstupte do **Nastavení** a následně **Bluetooth[®]** a klepněte na **přepínač** pro zapnutí Bluetooth[®].

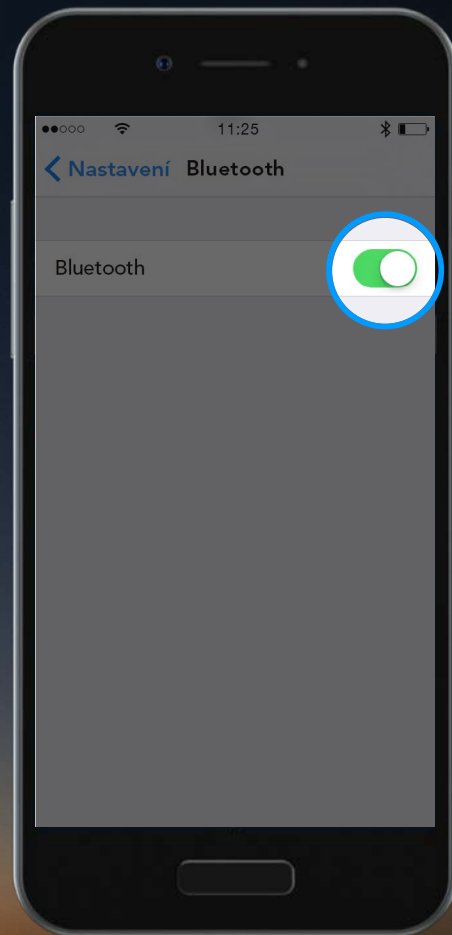

Contour[®]
plus **ONE**[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Spárování glukometru

V aplikaci **CONTOUR™ DIABETES** budete po nastavení účtu požádáni o spárování glukometru.

Vypněte glukometr a nechte jej v blízkosti mobilního zařízení.

Zvolte **Pokračovat**.



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

2.

Spárování glukometru

V aplikaci **CONTOUR™ DIABETES** budete po nastavení účtu požádáni o spárování glukometru.

Vypněte glukometr a nechte jej v blízkosti mobilního zařízení.

Zvolte **Pokračovat**.



Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Spárování glukometru

Stiskněte a podržte středové tlačítko na glukometru **CONTOUR® PLUS ONE**, dokud nevidíte modré světlo blikající z portu pro proužek.

Zvolte **Pokračovat**.



Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Spárování glukometru

Stiskněte a podržte středové tlačítko na glukometru **CONTOUR® PLUS ONE**, dokud nevidíte modré světlo blikající z portu pro proužek.

Zvolte **Pokračovat**.




Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Spárování glukometru

Stiskněte a podržte středové tlačítko na glukometru **CONTOUR® PLUS ONE**, dokud neuvidíte modré světlo blikající z portu pro proužek.

Zvolte **Pokračovat**.

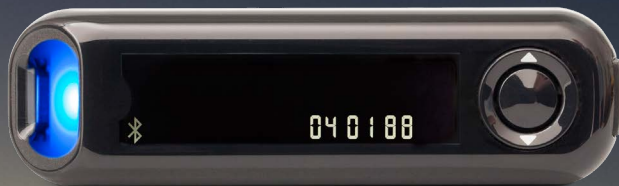


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

3.

Spárování glukometru

Stiskněte a podržte středové tlačítko na glukometru **CONTOUR® PLUS ONE**, dokud neuvidíte modré světlo blikající z portu pro proužek.

Zvolte **Pokračovat**.

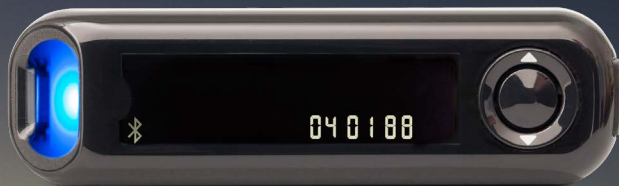

**Contour[®]
plus ONE[»]**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru



4.

Spárování glukometru

Zadejte výrobní číslo svého glukometru.

Najdete jej na štítku na zadní straně glukometru.

Zvolte **Pokračovat**.

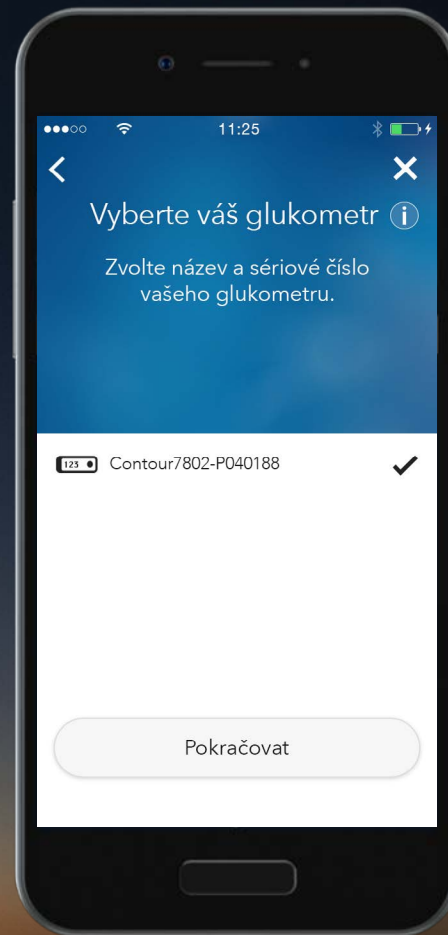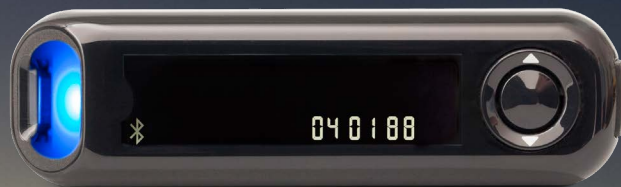

Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru



4.

Spárování glukometru

Zadejte výrobní číslo svého glukometru.

Najdete jej na štítku na zadní straně glukometru.

Zvolte **Pokračovat**.

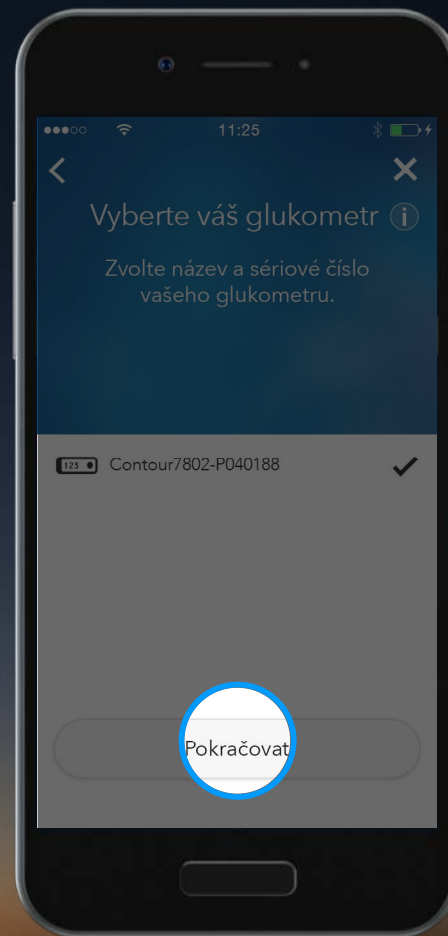
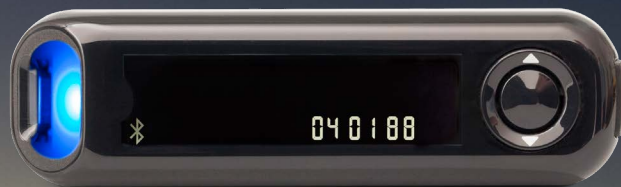


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

5.

Spárování glukometru

Ke glukometru se nyní připojí aplikace
CONTOUR™ DIABETES.

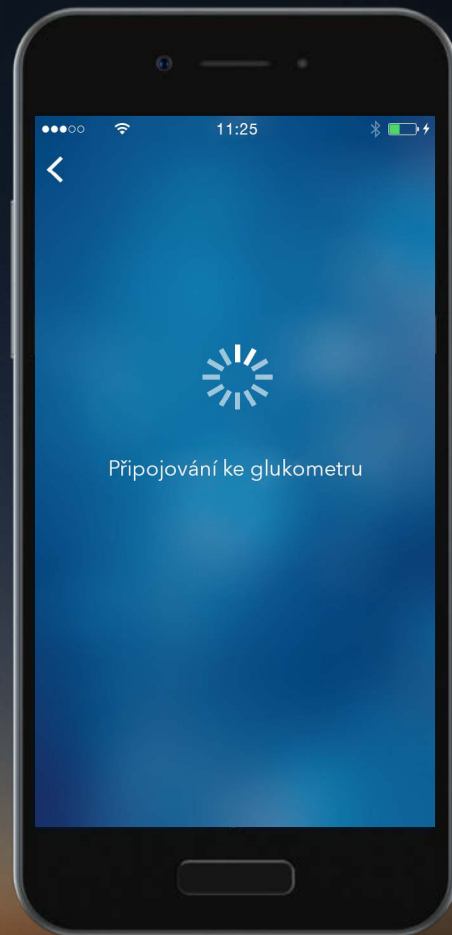
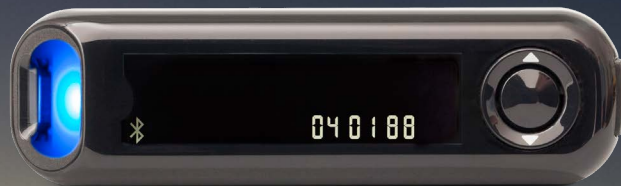


Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

6.

Spárování glukometru

Zvolte **Spárovat** pro potvrzení požadavku na spárování.

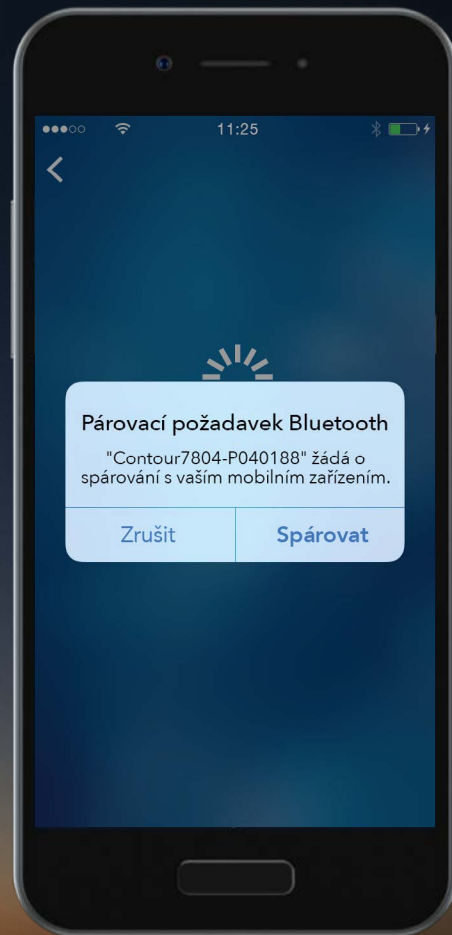
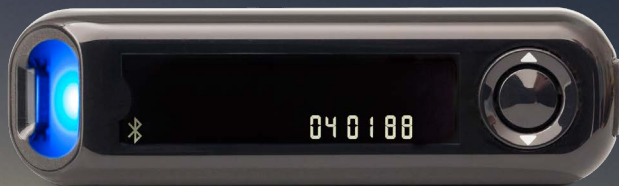


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

6.

Spárování glukometru

Zvolte **Spárovat** pro potvrzení požadavku na spárování.

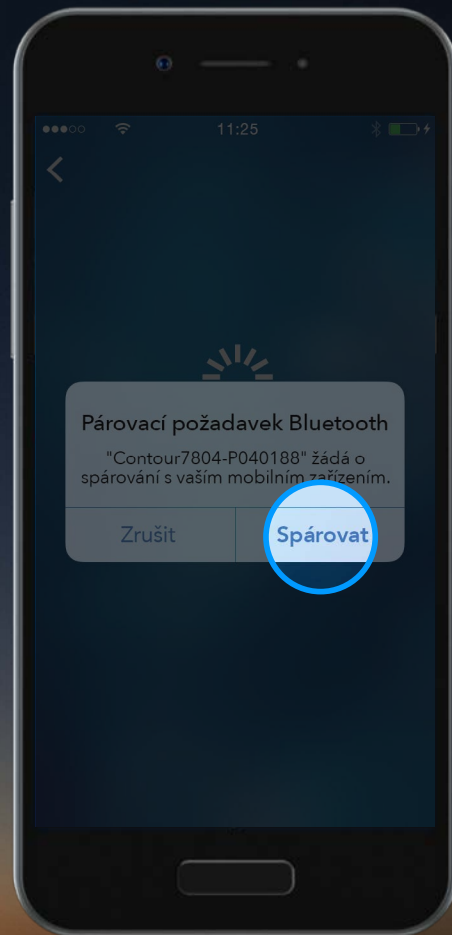
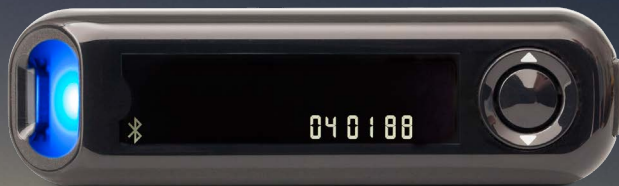


Contour
plus ONE
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

6.

Spárování glukometru

Zvolte **Spárovat** pro potvrzení požadavku na spárování.

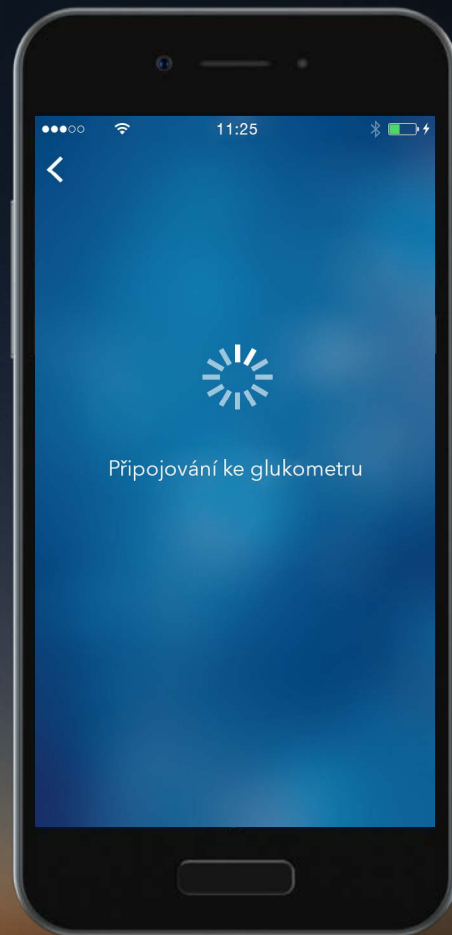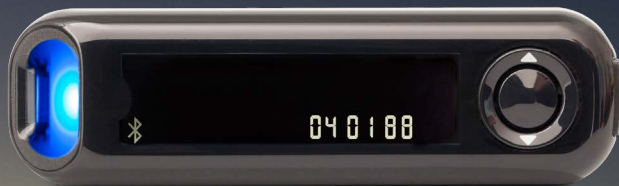

Contour[®]
plus ONE[»]
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

7.

Spárování glukometru

Jakmile je glukometr spárovaný, zvolte **Pokračovat**.

Nyní můžete provést nastavení aplikace **CONTOUR™ DIABETES**.



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

7.

Spárování glukometru

Jakmile je glukometr spárovaný, zvolte **Pokračovat**.

Nyní můžete provést nastavení aplikace **CONTOUR™ DIABETES**.



**Contour[®]
plus ONE[»]**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

Pokud máte dotazy ohledně glukometru **CONTOUR® PLUS ONE** a aplikace **CONTOUR™ DIABETES**, promluvte si se zdravotnickým odborníkem a odkažte se na uživatelskou příručku. Pro více informací a zjištění, zda je glukometr **CONTOUR® PLUS ONE** k dostání ve vaší zemi, navštivte diabetes.ascensia.com.



Jakoukoli změnu své léčby, stravy nebo sportovního zapojení vždy předem konzultujte se svým poskytovatelem lékařské péče.

Získání aplikace



Apple a logo Apple společnosti Apple Inc. jsou obchodní známky registrované v USA a ostatních zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Slovní známka a logo Bluetooth jsou registrované obchodní známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli použití těchto známek v tomto dokumentu podléhá oprávnění. Google Play a logo Google Play jsou obchodní známky společnosti Google Inc.

Datum přípravy: únor 2018 code: G.DC.12.2017.52589

© Copyright 2017. Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena.



**Contour
plus ONE**
Chytrý systém monitoringu
krevního cukru

diabetes.ascensia.com

