

Katalog produktů pro ošetřování a hojení ran

Smith+Nephew



VÍTEJTE

Tento komplexní katalog obsahuje podrobné informace o produktech společnosti Smith & Nephew, které jsou v současnosti k dispozici. Dokumenty k produktům jsou k dispozici na vyžádání u vašeho místního obchodního zástupce PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s..

Společnost Smith & Nephew také nabízí vzdělávací semináře o tématech, jako jsou ošetření rány, péče o bérkové ulcerace a podtlaková terapie. Naše školení, které dodává tým vysoce kvalifikovaných klinických specialistů, zahrnuje vysvětlení vhodného použití přípravku a základních klinických podmínek, za kterých mohou být produkty použity.

Vzdělávání a školení mohou být na míru přizpůsobeny podle zvoleného načasování, předmětu a umístění. Toto školení může být dodáno v podobě ucelených témat v rámci studijního dne, nebo jako výběr a mix modulů pro budování znalostí v menších časových úsecích podle klinických oblastí.

Společnost Smith & Nephew také poskytuje místní podporu a pomoc při spuštění nových forem léčby k dosažení klinicky ověřené a cenově výhodné péče o rány. Tato podpora vám pomůže s plánováním, organizací, tiskem a školením v závislosti na vašich konkrétních potřebách a požadavcích.

Další informace o produktech nebo jakýchkoli zdrojích nabízených společností Smith & Nephew získáte od místního zástupce nebo se podívejte na zadní stranu této brožury na užitečné kontaktní informace.

Informace obsažené v tomto katalogu se zakládají na pravdě a opírají se o vědecké studie, které mohou být poskytnuty na vyžádání.

OBSAH

Antimikrobiální krytí na rány

ACTICOAT[®] / ACTICOAT 7

ACTICOAT[®] Flex 3 / ACTICOAT Flex 7

Pěnová a silikonová absorpční krytí na rány

ALLEVYN[®] Adhesive/Sacrum

ALLEVYN[®] Ag Adhesive/Sacrum

ALLEVYN[®] Ag Non-Adhesive

ALLEVYN[®] Ag Gentle Border

ALLEVYN[®] Gentle Border/Heel/Sacrum

ALLEVYN[®] Gentle Border Lite

ALLEVYN[®] Heel/Ag Heel

ALLEVYN[®] Life/Heel/Sacrum

ALLEVYN[®] Life Non-Bordered

ALLEVYN[®] Non-Adhesive

ALLEVYN[®] Tracheostomy

Gelující vláknité krytí

DURAFIBER[®]

DURAFIBER[®] Ag

Algináty

ALGISITE[®] Ag

ALGISITE[®] M

Hydrokoloidní krytí

REPLICARE[®] Ultra

Enzymatické čištění ran

IRUXOL[®] Mono

Cadexomer s jódem

IODOSORB[®]

Hydrogel – hydratace ran

INTRASITE[®] Conformable

INTRASITE[®] Gel

Antiseptické a kontaktní krytí

BACTIGRAS[®]

JELONET[®]

CUTICERIN[®]

Neadhezivní krytí na rány

MELOLIN[®]

MELOLITE[®]

Filmové krytí

3 OPSITE[®] FLEXIFIX 31

4–5 OPSITE[®] FLEXIFIX Gentle 32

OPSITE[®] FLEXIGRID 33

OPSITE[®] Spray 34

Incizní fólie

8 OPSITE[®] Incise 35

9

10

11

12 Pooperační, fixační krytí, zabezpečení drénů 36

13 CICAPLAIE[®] 37

14 OPSITE[®] Post-Op 38

15 OPSITE[®] Post-Op Visible / Drain Dressing 38

16 PRIMAPORE[®] 39

Uzavírání ran

17 LEUKOCLIP[®] SD 40

18 LEUKOSTRIP[®] 41

Krytí I. V. vstupů

19 IV3000[®] 42–43

20

Biosyntetická a silikonová krytí na rány

21 BIOBRANE[®] 44

21 CICA-CARE[®] 45

Ochranné prostředky

22 PROSHIELD[®] 46

PROSHIELD[®] Plus 47

23 SECURA[®] 48

SKIN PREP[®] 49

REMOVE[®] 50

24

25

Hydrochirurgie

25 VERSAJET[®] II 51

Podtlaková terapie

26 PICO[®] 7/14 52–53

27 RENASYS[®] EZ MAX 54

28 RENASYS[®] GO 55

RENASYS[®] Příslušenství 56

29 RENASYS[®] Spotřební materiál 57–58

30 PROFORE[®] Plus 59

Antimikrobiální krytí na rány

ACTICOAT[◇]

ACTICOAT[◇] 7

Antibakteriální vícevrstvé krytí s nanokrystaly SILCRYST.

Použitá technologie vytváří vysoce rozpustnou formu stříbra, která při navlhčení rychle uvolňuje stříbrné ionty (Ag+) do rány. Antimikrobiální aktivita po dobu minimálně 3 dnů u krytí ACTICOAT. U krytí ACTICOAT 7 po dobu 7 dnů. Tím zabezpečuje efektivní ochranu rány před patogeny. ACTICOAT je účinný za pouhých 30 minut (in-vitro) proti více než 150 patogenům včetně MRSA, VRE.

INDIKACE

- infikované povrchové i hluboké rány
- popáleniny II. stupně
- dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
- odběrové plochy
- okolí zevních fixátorů

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- nepoužívejte u pacientů alergických na stříbro
- nepoužívejte u pacientů podstupujících vyšetření magnetickou rezonancí (MRI)
- krytí nevlhčete roztoky obsahujícími sloučeniny chlóru
- nekombinujte s antiseptiky
- zabarvení kůže pacienta nepoškozuje, není důvodem k přerušení léčby
- při prvních převazech může dojít k lehkému mravenčení, není důvodem k přerušení léčby, tento pocit vymizí

APLIKACE

Krytí navlhčete sterilní vodou nebo INTRASITE gelem (NEPOUŽÍVEJTE fyziologický roztok) a přiložte modrou stranou na spodinu rány, lehce může přesahovat okraje. V případě hlubokých ran vložte do rány. Kryjte sekundárním krytím (pěnové krytí ALLEVYN, vrstvené krytí MELOLIN, případně gázou). Výměnu proveďte po 3–4 dnech (u ACTICOAT 7 po 7 dnech) nebo v případě protečení sekundárního krytí. Ránu hodnotte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou. Díky nízké adhezi jsou převazy nebolestivé.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66000789	ACTICOAT	10 x 10 cm	5 ks	bal
66000792	ACTICOAT	10 x 20 cm	1 ks	ks
66000793	ACTICOAT	10 x 20 cm	1 ks	ks
66000808	ACTICOAT	5 x 5 cm	5 ks	bal
66000795	ACTICOAT	10 x 120 cm	6 ks	bal
66000791	ACTICOAT	10 x 10 cm	12 ks	bal
66000794	ACTICOAT	40 x 40 cm	1 ks	ks
66000796	ACTICOAT 7	10 x 12 cm	5 ks	bal
66000797	ACTICOAT 7	15 x 15 cm	1 ks	ks
66000809	ACTICOAT 7	5 x 5 cm	5 ks	bal

ACTICOAT[◇] Flex 3

ACTICOAT[◇] Flex 7

Antimikrobiální bariérové krytí potažené stříbrem

Flexibilní polyesterová mřížka s nanokrystalickým stříbrem SILCRYST s otevřenou strukturou.

- vysoce flexibilní, zabezpečuje dokonalé kopírování spodiny rány
- prokázané antimikrobiální vlastnosti
- otevřená struktura umožňuje průchod tekutiny krytím
- má nízkou adhezi, nepřilepí se ke spodině
- krytí může být použito v kombinaci s podtlakovou a kompresní terapií
- snadná aplikace, krytí lze stříhat, nemusí se před aplikací vlhčit sterilní vodou nebo gelem

Krytí je vyrobené ze 100% polyesteru. Stříbro je nanášeno na obou stranách krytí. Síťová struktura umožňuje prostupnost exsudátu k sekundárnímu krytí. Díky tomu, že je spájeno ultrazvukem, zůstává celistvé jak při aplikaci, tak při následné výměně. Může být stříháno podle velikosti rány a jeho vysoká pružnost neomezuje pacienta v pohybu. Jedná se o neadherentní krytí, což zabezpečuje jeho atraumatickou výměnu. Krytí uvolňuje stříbro stabilně po dobu 3 dnů u ACTICOAT FLEX 3, u krytí ACTICOAT FLEX 7 dochází ke stabilnímu uvolňování po dobu 7 dnů.

ACTICOAT FLEX je účinný za pouhých 30 minut (in-vitro) proti více než 150 patogenům včetně:

- grampozitivním, gramnegativním bakteriím, plísním a kvasinkám
- kmenům *Staphylococcus aureus* rezistentním na Meticilin (MRSA)
- enterokokům rezistentním na Vancomycin (VRE)
- bakteriím obsahujícím karbapenemasy NDM-1

INDIKACE

- infikované povrchové i hluboké rány
- popáleniny II. a III. stupně
- odběrové plochy
- chirurgické rány
- dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
- krytí štěpů
- kombinace s podtlakovou terapií (Pico, Renasys)
- je možné použít v kontaktu s kostí


APLIKACE

Pokud je rána suchá nebo jen mírně secernuje, navlhčete krytí sterilní vodou (NEPOUŽÍVEJTE fyziologický roztok) nebo INTRASITE gelem. Pokud se jedná o výrazně secernující ránu, není třeba obvaz zvlhčovat.

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány, lehce může přesahovat okraje. V případě hlubokých ran vložte do rány, u píštělí si krytí upravte na proužek a pinzetou vložte do rány. Kryjte sekundárním krytím (pěnové krytí ALLEVYN, vrstvené krytí MELOLIN, případně gázou). Výměnu proveďte 3–4 den (u ACTICOAT FLEX 7 po 7 dnech) nebo v případě prosáknutí do sekundárního krytí. Ránu hodnotěte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- nepoužívejte u pacientů alergických na stříbro
- nepoužívejte u pacientů během vyšetření magnetickou rezonancí (MRI)
- nepoužívejte u pacientů během radiační terapie
- krytí nevlhčete roztoky obsahujícími sloučeniny chlóru (např. fyziologický roztok)
- nekombinujte s antiseptiky
- zabarvení kůže pacienta nepoškozuje, není důvodem k přerušení léčby
- při prvních převazech může dojít k lehkému mravenčení, není důvodem k přerušení léčby, tento pocit vymizí
- vyvarujte se kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely, které se používají při vyšetření EKG a EEG
- nekombinujte s výrobky na bázi oleje

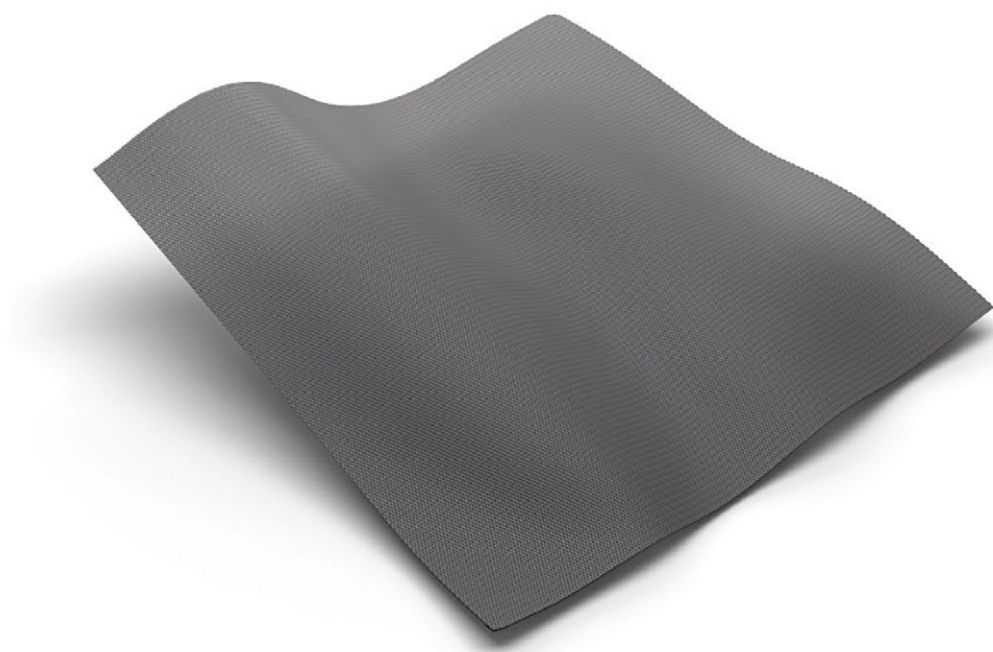

Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800396	ACTICOAT FLEX 3	5 x 5 cm	5 ks	bal
66800399	ACTICOAT FLEX 3	10 x 10 cm	12 ks	bal
66800398	ACTICOAT FLEX 3	10 x 10 cm	5 ks	bal
66800409	ACTICOAT FLEX 3	10 x 20 cm	12 ks	bal
66800419	ACTICOAT FLEX 3	20 x 40 cm	6 ks	bal
66800432	ACTICOAT FLEX 3	40 x 40 cm	6 ks	bal
66800435	ACTICOAT FLEX 3	10 x 120 cm	6 ks	bal
66800395	ACTICOAT FLEX 7	5 x 5 cm	5 ks	bal
66800397	ACTICOAT FLEX 7	10 x 12,5 cm	5 ks	bal
66800420	ACTICOAT FLEX 7	15 x 15 cm	5 ks	bal
66800400	ACTICOAT FLEX 7	20 x 40 cm	6 ks	bal
66800401	ACTICOAT FLEX 7	40 x 40 cm	6 ks	bal

Pěnová a silikonová absorpční krytí na rány

ALLEVYN[◇] Adhesive/Sacrum

Krytí speciálně určené k léčbě chronických nebo akutních exsudativních ran.

- optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem udržuje ideální vlhké prostředí
- flexibilní, lze přizpůsobit problematickým oblastem, jako jsou lokty a paty
- snadná aplikace
- hypoalergenní adhezivum po celé ploše pěny pomáhá udržet krytí bezpečně na místě bez přilnutí k ráně
- dobrá fixace, schopnost rozložit tlak na predilekčních místech
- spolehlivá ochrana vůči bakteriím, voděodolné
- nákladově efektivní, snížená frekvence výměn
- adhezivní silikonový okraj
- vysoce prodyšný vrchní film pomáhá minimalizovat riziko macerace rány a jejího okolí
- nízký profil okraje, minimální shrnování okrajů při polohování pacienta
- k dispozici v široké škále velikostí


ALLEVYN SACRUM je třívrstvé pěnové, anatomicky tvarované krytí s adhezivním okrajem na sakrální oblast.

INDIKACE

- dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
- odběrové plochy
- popáleniny I. a II. stupně
- na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu v granulační fázi
- onkologické rány
- akutní rány
- rány po transplantaci

APLIKACE

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí přesahovalo asi 1 cm přes okraje rány (vnitřní rozměr). Dbejte, aby byly okraje rány suché, pro lepší adhezi použijte SECURA sprej. Frekvence výměn je 3–4 dny nebo při prosáknutí. Krytí lze ponechat až 7 dní. Ránu hodnotte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

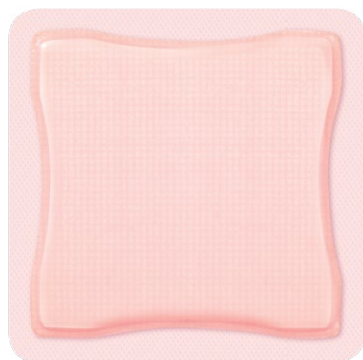

Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66000043	ALLEVYN ADHESIVE	7,5 x 7,5 cm	10 ks	bal
66000348	ALLEVYN ADHESIVE	7,5 x 7,5 cm	3 ks	bal
66000044	ALLEVYN ADHESIVE	12,5 x 12,5 cm	10 ks	bal
66000349	ALLEVYN ADHESIVE	12,5 x 12,5 cm	3 ks	bal
66000045	ALLEVYN ADHESIVE	17 x 17 cm (15 x 15)	1 ks	ks
66000046	ALLEVYN ADHESIVE	22,5 x 22,5 cm	10 ks	bal
66000700	ALLEVYN SACRUM	17 x 17 cm	10 ks	bal
66000451	ALLEVYN SACRUM	22 x 22 cm	10 ks	bal

ALLEVYN[®] Ag Adhesive/Sacrum

Pěnové krytí s obsahem iontového stříbra.

K dispozici také ve speciálním tvaru pro sakrální oblast. Lze použít na paty, loket, amputační pahýl, varlata.

- antibakteriální efekt, snižuje bakteriální zátěž a odstraňuje tak překážky v hojení rány
- široké spektrum působení proti celé řadě patogenů
- snadná aplikace
- spolehlivá ochrana vůči bakteriím, voděodolné
- nákladově efektivní, snížená frekvence výměn
- adhezivní silikonový okraj
- nízký profil okraje, minimální shrnování okrajů při polohování pacienta
- optimální management exsudátu – ideální vlhké prostředí

INDIKACE

- infikované rány, kriticky kolonizované
- akutní rány s rizikem infekce
- diabetické defekty, dekubity, bércové ulcerace, dehiscence
- na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu
- popáleniny I. a II. stupně
- onkologické rány

APLIKACE

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje rány (vnitřní rozměr). Dbejte, aby byly okraje rány suché, pro lepší adhezi použijte SECURA sprej. Frekvence výměn je 3–4 dny nebo při prosáknutí. Krytí lze ponechat až 7 dní. Krytí lze kombinovat s INTRASITEGEL. Ránu hodnotte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800072	ALLEVYN Ag ADHESIVE	7,5 x 7,5 cm	10 ks	bal
66800074	ALLEVYN Ag ADHESIVE	10 x 10 cm	10 ks	bal
66800076	ALLEVYN Ag ADHESIVE	12,5 x 12,5 cm	10 ks	bal
66800080	ALLEVYN Ag ADHESIVE	17,5 x 17,5 cm	10 ks	bal
66800092	ALLEVYN Ag SACRUM	17 x 17 cm	10 ks	bal
66800095	ALLEVYN Ag SACRUM	22 x 22 cm	10 ks	bal

ALLEVYN[®] Ag Non-Adhesive

Pěnové krytí s obsahem iontového stříbra.

Neadherentní kontaktní vrstva, díky níž je krytí vhodné pro použití i na křehké a citlivé kůži včetně ran epidermolysis bullosa.

Tvar krytí je možné přizpůsobit velikosti rány, lze vkládat do hlubších ran.

Široká škála velikostí, které lze stříháním přizpůsobit tak, aby vyhovovaly různým obrysům těla.

- optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
- antibakteriální efekt, snižuje bakteriální zátěž a odstraňuje tak překážky v hojení rány
- široké spektrum působení proti celé řadě patogenů
- snadná aplikace
- spolehlivá ochrana vůči bakteriím, voděodolné
- nákladově efektivní, snížená frekvence výměn

INDIKACE

- dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
- infikované rány, kriticky kolonizované nebo rány s rizikem infekce
- odběrové plochy, popáleniny
- na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800082	ALLEVYN Ag NON ADHESIVE	5 x 5 cm	10 ks	bal
66800084	ALLEVYN Ag NON ADHESIVE	10 x 10 cm	10 ks	bal
66800087	ALLEVYN Ag NON ADHESIVE	15 x 15 cm	10 ks	bal
66800090	ALLEVYN Ag NON ADHESIVE	20 x 20 cm	10 ks	bal

ALLEVYN[◇] Ag Gentle Border

Polyuretanové antimikrobiální pěnové krytí. Jemná vrstva gelu a mírně přilnavé vlastnosti vytvořené speciálně pro citlivou pokožku.

Pěnové krytí s integrovanými ionty stříbra. Kontaktní vrstva je pokryta jemnou vrstvou přilnavého gelu.

- jemná vrstva gelu a mírně přilnavé vlastnosti vytvořené speciálně pro citlivou pokožku
- rychlé a trvanlivé antibakteriální účinky
- účinný proti širokému spektru patogenů
- optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
- zcela atraumatické převazy, voděodolné
- krytí lze opakovaně nalepit

INDIKACE

- infikované rány, kriticky kolonizované nebo rány s rizikem infekce
- rány s křehkým okolím rány
- diabetické defekty, dekubity, bércové ulcerace, dehiscence
- místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
- na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu

APLIKACE

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje. Krytí s okrajem není nutné fixovat. Frekvence výměn po 3–4 dnech nebo při podtečení. Ránu hodnotte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou. Krytí lze kombinovat s INTRASITE GELEM.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800436	ALLEVYN Ag GENTLE BORDER	7,5 x 7,5 cm	10 ks	bal
66800437	ALLEVYN Ag GENTLE BORDER	10 x 10 cm	10 ks	bal
66800438	ALLEVYN Ag GENTLE BORDER	12,5 x 12,5 cm	10 ks	bal
66800439	ALLEVYN Ag GENTLE BORDER	17,5 x 17,5 cm	10 ks	bal

ALLEVYN[◇] Gentle Border /Heel/Sacrum

Silikonové gelové adhezní hydrocelulární pěnové krytí. Unikátní tvar se širokým okrajem dokonale kopíruje povrch lidského těla, zabezpečuje ideální fixaci.

Pěnová a silikonová absorpční krytí určena pro lidi s obzvláště citlivou nebo křehkou kůží.


- technologie ALLEVYN triple-action udržuje optimální management exsudátu
- zcela atraumatické převazy, voděodolné
- krytí lze opakovaně nalepit
- komfortní, zmírňuje tlak na predilekční místa
- k dispozici v řadě tvarů a velikostí – čtverce, obdélníky a řada tvarů pro zajištění komplikovaných ploch

INDIKACE

- diabetické defekty, dekubity, bérkové ulcerace, dehiscence
- místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
- na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu v granulační a epitalizační fázi

APLIKACE

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje rány. Frekvence výměn je po 3–4 dnech nebo při podtečení. Ránu hodnotte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

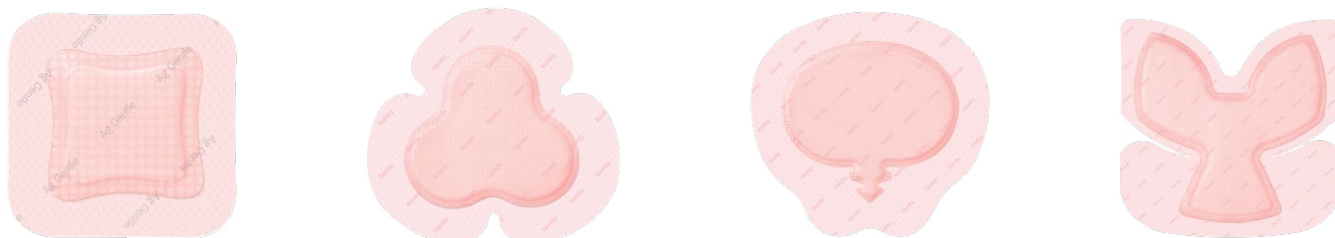

Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800269	ALLEVYN GENTLE BORDER	7,5 x 7,5 cm	10 ks	bal
66800270	ALLEVYN GENTLE BORDER	10 x 10 cm	10 ks	bal
66800272	ALLEVYN GENTLE BORDER	12,5 x 12,5 cm	10 ks	bal
66800975	ALLEVYN GENTLE BORDER	15 x 15 cm	10 ks	bal
66800273	ALLEVYN GENTLE BORDER	17,5 x 17,5 cm	10 ks	bal
66800900	ALLEVYN GENTLE BORDER	10 x 20 cm	10 ks	bal
66800264	ALLEVYN GENTLE BORDER	10 x 25 cm	10 ks	bal
66800265	ALLEVYN GENTLE BORDER	10 x 30 cm	10 ks	bal
66800959	ALLEVYN GENTLE BORDER MULTISITE	17,1 x 17,9cm	10 ks	bal
66800506	ALLEVYN GENTLE BORDER HEEL	23 x 23,2 cm	5 ks	bal
66800897	ALLEVYN GENTLE BORDER SACRUM	16,8 x 17,1 cm	6 ks	bal
66801031	ALLEVYN GENTLE BORDER LARGE SACRUM	21,6 x 23cm	10 ks	bal

ALLEVYN[®] Gentle Border Lite

Tenké pěnové krytí s jemnou kontaktní vrstvou potaženou gelem.


- jemná vrstva gelu má přilnavé vlastnosti speciálně pro citlivou pokožku
- optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
- zcela atraumatické převazy, voděodolné
- krytí lze opakovaně nalepit
- dostupné v širokém spektru tvarů

INDIKACE

- diabetické defekty, dekubity, bérkové ulcerace, dehiscence
- místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
- epidermolysis bullosa
- na rány se středním a nižším množstvím exsudátu v granulační a epitalizační fázi
- prevence dekubitů způsobených sondami, katétry

APLIKACE

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje rány (vnitřní čtverec). Krytí s okrajem není nutné fixovat. Frekvence výměn každé 3–4 dny nebo při podtečení. Ránu hodnotte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

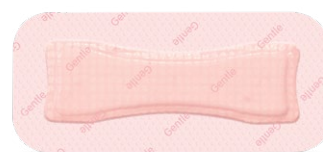

Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800833	ALLEVYN GENTLE BORDER LITE	5 x 5 cm	10 ks	bal
66800834	ALLEVYN GENTLE BORDER LITE	7,5 x 7,5 cm	10 ks	bal
66800835	ALLEVYN GENTLE BORDER LITE	10 x 10 cm	10 ks	bal
66800836	ALLEVYN GENTLE BORDER LITE	5,5 x 12 cm	10 ks	bal
66800837	ALLEVYN GENTLE BORDER LITE	8 x 15 cm	10 ks	bal
66800840	ALLEVYN GENTLE BORDER LITE	15 x 15 cm	10 ks	bal
66801012	ALLEVYN GENTLE BORDER LITE	10 x 20 cm	10 ks	bal
66801013	ALLEVYN GENTLE BORDER LITE OVAL	8,6 x 7,7 cm	10 ks	bal
66801014	ALLEVYN GENTLE BORDER LITE OVAL	15,2 x 13,1 cm	10 ks	bal
66801041	ALLEVYN GENTLE BORDER LITE MULTISITE	8 x 8,4 cm	10 ks	bal

ALLEVYN[◇] Heel/Ag Heel

Neadhezní polyuretanové krytí – sterilní

Pěnové krytí ve variantě bez obsahu iontového stříbra, nebo s ním.

Má speciální tvar určený na paty, lokty, amputační pahýl, varlata, hlavičku novorozenců.


- optimální management exsudátu díky technologii s trojím účinkem – ideální vlhké prostředí
- jedinečná třívrstvá konstrukce
- nelepivá vrstva kontaktu s ránou
- vysoce absorpční centrální hydrocelulární vrstva
- s obsahem Ag – působení proti širokému spektru patogenů
- snadná aplikace
- spolehlivá ochrana vůči bakteriím
- nákladově efektivní, snížená frekvence výměn
- voděodolný film na vnější vrstvě

INDIKACE

- prevence dekubitů
- infikované rány, kriticky kolonizované nebo rány s rizikem infekce
- diabetické defekty, dekubity, amputační dehiscence
- dekubity v oblasti varlat
- na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu

APLIKACE

V případě prevence dekubitů přiložte a fixujte filmovým krytím OPSITEFLEXIFIX, náplastí nebo pružným návlekm. V případě použití na ránu aplikujte po jejím očištění a zafixujte. Ránu hodnoťte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou. Krytí lze kombinovat s INTRASITEGELEM.

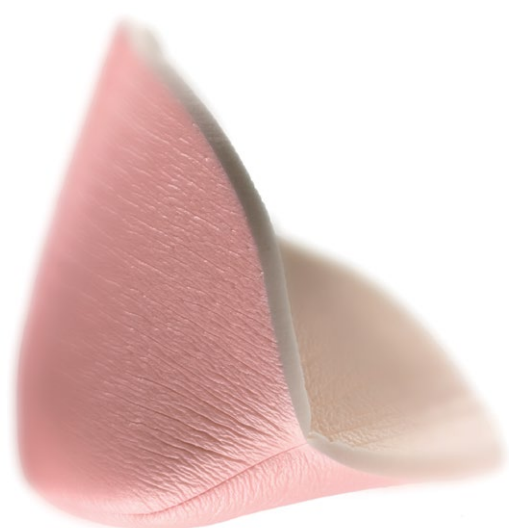

Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66007630	ALLEVYN HEEL	10,5 x 13,5 cm	5 ks	bal
66800098	ALLEVYN Ag HEEL	10,5 x 13,5 cm	5 ks	bal

ALLEVYN[◇] Life/Heel/Sacrum

Vícevrstvé hydrocelulární pěnové krytí s absorpční vrstvou netradičního tvaru se širokým silikonovým okrajem.

- unikátní tvar se širokým okrajem dokonale kopíruje povrch lidského těla, zabezpečuje ideální fixaci
- umožňuje pacientům sprchování, je diskrétní
- má unikátní vlastnosti pěny Allevyn, uzamyká exsudát, pod kompresní terapií krytí nepodtéká
- poskytuje tlakovou ochranu a pomáhá rozložit tlak, vhodné na oblast sacra a paty
- široké silikonové okraje zabezpečují dokonalou netraumatickou fixaci
- atraumatické odstranění
- možnost opětovného nalepení

ALLEVYN Life Sacrum má jedinečný tvar, navržený speciálně pro rány v křížové oblasti, kde kopíruje anatomii těla, aby pomohl překonat běžné problémy jako nepřilnavost krytí.

ALLEVYN Life Heel má jedinečný design a je jediným krytím paty, které zajišťuje pokrytí malleolu bez nutnosti sekundárního obvázání.

INDIKACE

- dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
- místa po přenesení kožních štěpů
- na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu

APLIKACE

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost vnitřního polštářku by měla lehce přesahovat okraje rány. Indikátorem k výměně je prosákly vnitřní polštářek (viz obrázek) nebo podtečení krytí. Ránu hodnotte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou. Krytí lze kombinovat s INTRASITE gelem.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66801067	ALLEVYN LIFE	10,3 x 10,3 cm	10 ks	bal
66801068	ALLEVYN LIFE	12,9 x 12,9 cm	10 ks	bal
66801069	ALLEVYN LIFE	15,4 x 15,4 cm	10 ks	bal
66801070	ALLEVYN LIFE	21 x 21 cm	1ks	ks
66801304	ALLEVYN LIFE HEEL		1 ks	bal
66801306	ALLEVYN LIFE SACRUM	malé	10 ks	bal
66801307	ALLEVYN LIFE SACRUM	velké	10 ks	bal

ALLEVYN[◇] Life Non-Bordered

Pětivrstvý hydrocelulární pěnový obvaz s vysoce absorpčním jádrem a silikonem s nízkou přilnavostí.

- pětivrstvý design je ideální pro prevenci dekubitů a pro absorpci exsudátu
- redistribuuje tlak rovnoměrněji než tradiční pěnové obvazy
- pomáhá předcházet bakteriální kontaminaci
- vysoce přizpůsobitelný s měkkou silikonovou kontaktní vrstvou s nízkou lepivostí
- maskovací vrstva chrání viditelnost exsudátu
- lze použít při kompresní terapii
- je možné rozstříhat

INDIKACE

- akutní i chronické rány
- ulcerace včetně diabetických
- popáleniny I. a II. stupně
- místa po odběru kožního štěpu při transplantaci



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66801747	ALLEVYN LIFE NON-BORDER	5,5 x 5 cm	10 ks	bal
66801748	ALLEVYN LIFE NON-BORDER	10,5 x 10,5 cm	10 ks	bal
66801749	ALLEVYN LIFE NON-BORDER	16 x 16 cm	10 ks	bal
66801750	ALLEVYN LIFE NON-BORDER	21 x 21 cm	10 ks	bal
66801751	ALLEVYN LIFE NON-BORDER	10 x 20 cm	10 ks	bal
66801752	ALLEVYN LIFE NON-BORDER 20 x 50	20 x 50 cm	2 ks	bal

ALLEVYN[◇] Non-Adhesive

Polyuretanové krytí – sterilní.

Pěnové krytí na rány s nepřilnavým povrchem bez lepicího okraje. Unikátní třívrstvá konstrukce pěnového krytí zabezpečuje optimální management exsudátu – ideální vlhké prostředí. Vrchní inteligentní vodotěsná vrstva je schopna regulovat odpařování a zároveň napomáhá prevenci bakteriální kontaminace rány.

- pomáhá minimalizovat riziko macerace
- na rány se střední až vysokou úrovní exsudátu
- velká plocha má zvýšenou absorpční schopnost
- je flexibilní, s možností úpravy na potřebnou velikost
- krytí lze snadno aplikovat i odstranit
- díky tomu, že neobsahuje lepidlo, je vhodný i pro jemnou pokožku

INDIKACE

- dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
- místa po přenesení kožních štěpů, popáleniny
- na rány se středním a vyšším množstvím exsudátu v granulační fázi
- maligní rány
- operační rány
- popáleniny I. a II. stupně

ALLEVYN Non-Adhesive lze použít ve spojení s INTRASITE GELEM na nekrotické rány.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nepoužívejte ALLEVYN Non-Adhesive spolu s oxidačními činidly, např. s roztoky chlornanu nebo peroxidem vodíku. Může dojít k narušení absorpční polyuretanové složky krytí. Velikost krytí volte tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje rány. Aplikujte bílou stranou na ránu, aby s ní byla v kontaktu a fixujte OPSITE Flexifix náplastí nebo obvazem. Krytí lze ponechat až 7 dnů, popř. dokud viditelný exsudát nedosahuje 1,5 cm od okraje náplasti, podle toho, co nastane dříve. V oblasti kříže lze ponechat po dobu až 5 dnů.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800082	ALLEVYN Ag NON ADHESIVE	5 x 5 cm	10 ks	bal
66800084	ALLEVYN Ag NON ADHESIVE	10 x 10 cm	10 ks	bal
66800087	ALLEVYN Ag NON ADHESIVE	15 x 15 cm	10 ks	bal
66800090	ALLEVYN Ag NON ADHESIVE	20 x 20 cm	10 ks	bal

ALLEVYN[®] Tracheostomy

Hydrofilní polyuretanové krytí s otvorem.

Pěnové krytí na tracheostomie s výřezem ve tvaru „klíčové dírky“ umožňuje umístění kolem tracheostomické kanyly nebo jiného katétru či stomie.

- snadná aplikace, komfort pro pacienta
- dokáže absorbovat velké množství sekretu
- nákladově efektivní, snížená frekvence výměn
- krytí lze zastříhnout podle požadované velikosti

APLIKACE

- Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány kolem kanyly.
- Frekvence výměny každé 3–4 dny, při podtečení nebo podle standardu nemocnice.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Krytí na tracheostomie ALLEVYN Tracheostomy nepoužívejte spolu s oxidačními činidly, jako jsou roztoky chlornanu draselného nebo peroxid vodíku, jelikož ty mohou narušit absorpční polyuretanovou část krytí.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66007640	ALLEVYN Tracheostomy	9 x 9 cm	10 ks	bal
66010674	ALLEVYN Tracheostomy Paediatric	4 x 6 cm	10 ks	bal

Gelující vláknité krytí

DURAFIBER[◇]

Gelující vláknité krytí, vysoce absorpční a přizpůsobivé.
Při kontaktu s exsudátem se mění v soudržný gel.

Vlákná DURAFIBER absorbují a uzamykají exsudát včetně bakterií v krytí.

- vysoká absorpční schopnost a retenční kapacita
- při styku s exsudátem gelovatí, nemění svůj objem – nesmršťuje se
- vytváří ideální vlhké prostředí
- podporující autolytické čištění rány, následnou granulaci a epitelizaci
- krytí je celistvé – netrhá se, lze ho stříhat
- šetrná a přizpůsobivá gelová matice
- odstranění v jednom kusu – vysoká pevnost za mokra a strukturální integrita
- dokonale kopíruje spodinu rány a minimalizuje mrtvý prostor

INDIKACE

- dekubity, diabetické defekty, bérkové ulcerace, dehiscence
- odběrové plochy, popáleniny
- akutní i chronické rány se středním s vyšším množstvím exsudátu, hluboké i plošné

APLIKACE

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje rány. Krytí překryjte sekundárním krytím (ALLEVYN, MELOLIN nebo gáza). Frekvence výměn je po 3–4 dnech nebo při prosáknutí sekundárního krytí. Ránu hodnotte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

DURAFIBER může být používán v kombinaci s řadou sekundárního krytí včetně přípravků ALLEVYN a PROFORE.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800029	DURAFIBER	5 x 5 cm	10 ks	bal
66800030	DURAFIBER	10 x 10 cm	10 ks	bal
66800031	DURAFIBER	15 x 15 cm	5 ks	bal
66800033	DURAFIBER	2 x 45 cm	5 ks	bal
66800546	DURAFIBER	4 x 10 cm	5 ks	bal
66800547	DURAFIBER	4 x 20 cm	5 ks	bal
66800548	DURAFIBER	4 x 30 cm	5 ks	bal
66800551	DURAFIBER	10 x 12 cm	10 ks	bal

DURAFIBER[◇] Ag

Stříbrné gelující vláknité krytí.

Absorpční, netkané, stříbro obsahující antimikrobiální krytí, složené z celulóзовých ethylsulfátových vláken. Iontové stříbro v obvazu zajišťuje antimikrobiální účinky proti širokému spektru běžných patogenů rány a díky těmto účinkům klesá bakteriální zátěž a riziko infekce. Trvalá antimikrobiální aktivita (in vitro) až 7 dní proti širokému spektru patogenů.

Při kontaktu s tekutinou se v ráně rychle vytváří čirý chladný gel, který absorbuje přebytečnou tekutinu, uzamyká exsudát z rány a vytváří vlhké prostředí, které podporuje autolytické hojení.

- vysoká absorpční a retenční kapacita
- unikátní vlastnosti proti srážení
- šetrná přizpůsobivá gelová matice
- odstranění v jednom kusu – vysoká pevnost za mokra a strukturální integrita

INDIKACE

- dekubity, diabetické defekty, bércové ulcerace, dehiscence
- odběrové plochy, popáleniny
- rány se středním a vyšším množstvím exsudátu, hluboké i plošné

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Velikost krytí volte tak, aby krytí přesahovalo cca 1 cm přes okraje rány. Krytí překryjte sekundárním krytím (ALLEVYN, MELOLIN nebo gáza). Frekvence výměn je po 3–4 dnech nebo při prosáknutí sekundárního krytí. Ránu hodnotte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

DURAFIBER Ag může být používán v kombinaci s řadou sekundárního krytí včetně přípravků ALLEVYN a PROFORE.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800034	DURAFIBER Ag	5 x 5 cm	10 ks	bal
66800035	DURAFIBER Ag	10 x 10 cm	10 ks	bal
66800036	DURAFIBER Ag	15 x 15 cm	5 ks	bal
66800037	DURAFIBER Ag	20 x 30 cm	5 ks	bal
66800038	DURAFIBER Ag	2 x 45 cm	5 ks	bal
66800583	DURAFIBER Ag	4 x 10 cm	5 ks	bal
66800584	DURAFIBER Ag	4 x 20 cm	5 ks	bal
66800585	DURAFIBER Ag	4 x 30 cm	5 ks	bal

Algináty

ALGISITE[◇] Ag

Krytí s alginátem vápenatým a stříbrem.

Stříbrem impregnované kalcium-alginátové krytí na infikované rány a na rány s rizikem infekce. Při styku s exsudátem se mění v gel. Má vysokou absorpční schopnost. Vzhledem k vyspělé technologii pojení jsou vlákna kompaktní – lze odstranit vcelku.

- antimikrobiální účinek proti širokému spektru patogenů v ranách po dobu až 7 dnů
- dokonale kopíruje spodinu rány
- díky gelu zajišťuje vlhké prostředí v ráně

INDIKACE

- rány se středním až vysokým množstvím exsudátu
- dekubity, bércové ulcerace, diabetické defekty, dehiscence, odběrové plochy
- plošné, dutiny, píštěle
- pro snadnější kontrolu menšího krvácení
- onkologické rány a popáleniny

APLIKACE

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Krytí není určeno k tomu, aby překrývalo okraje rány, a proto je jakýkoli přesah nutno odstříhnout nebo přeložit přes povrch rány. Okolí rány ošetřete SECURA sprejem. Překryjte krytím ALLEVYN s adhezivním okrajem, MELOLIN nebo gázou. Pokud je rána hluboká, alginátový proužek může být tou nejlepší volbou. Zakryjte ho vhodným krytím. Alginát bude absorbovat exsudát a vytvoří na povrchu rány hydrofilní gel. Exsudát z rány se bude z tohoto gelového povrchu vypařovat, a proto je třeba v případě, kdy je exsudátu velké množství, zajistit, aby sekundární krytí nebránilo tomuto odpařovacímu procesu.

FREKVENCE VÝMĚN

Četnost výměny krytí závisí na typu a stavu rány. V případě infikovaných nebo silně secernujících ran by se mělo krytí obecně měnit každý den, ve fázi hojení se četnost může snížit na 2x týdně. Krytí vyměňte, pokud dojde k vyplnění rány exsudátem nebo nasycení sekundárního krytí exsudátem. Ránu hodnoťte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

ODSTRANĚNÍ KRYTÍ

Při odstranění krytí ALGISITE M vysoká pevnost za mokra většinou umožní, aby zůstalo v jednom kuse. Při použití u ran s velmi malým množstvím exsudátu se může krytí k ráně přilepit. V případě, že krytí nelze snadno odstranit, nasyťte ho fyziologickým roztokem a odstraňte.

DOPORUČENÍ K APLIKACI

Aby se krytí k rukavici nebo nástroji nepřichytilo, doporučujeme prsty či nástroj navlhčit sterilním fyziologickým roztokem.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Ujistěte se, že obal byl odstraněn ze všech záhybů, dutin apod. I když je krytí ALGISITE M vhodné k léčení ran náchylných k lehkému krvácení, není určeno k použití jako chirurgická houba nebo k zástavě krvácení silně krvácejících ran. Nepoužívejte u pacientů s prokázanou alergií na alginátové krytí nebo stříbro.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800111	ALGISITE Ag	5 x 5 cm	10 ks	bal
66800112	ALGISITE Ag	10 x 10 cm	10 ks	bal
66800113	ALGISITE Ag	10 x 20 cm	5 ks	bal
66800114	ALGISITE Ag	2 x 30 cm	5 ks	bal

ALGISITE[◇] M

Krytí s alginátem vápenatým – sterilní.

Kalcium-alginátové krytí na rány. Při styku s exsudátem se mění v gel. Má vysokou absorpční schopnost.

Vzhledem k vyspělé technologii pojení jsou vlákna kompaktní – lze odstranit vcelku.

Krytí s alginátem vápenatým se skládá z husté, vysoce absorpční výplně z netkaných alginátových vláken.

- dokonale kopíruje spodinu rány
- díky gelu zajišťuje vlhké prostředí v ráně

INDIKACE

- rány se středním až vysokým množstvím exsudátu
- dekubity, bérkové ulcerace, diabetické defekty, dehiscence, odběrové plochy
- plošné, dutiny, píštěle
- pro snadnější kontrolu menšího krvácení
- onkologické rány a popáleniny

APLIKACE

Krytí přiložte na očištěnou spodinu rány. Krytí není určeno k tomu, aby překrývalo okraje rány, a proto je jakýkoli přesah nutno odstříhnout nebo přeložit přes povrch rány. Okolí rány ošetřete SECURA sprejem. Překryjte krytím ALLEVYN s adhezivním okrajem, MELOLIN nebo gázou. Pokud je rána hluboká, alginátový proužek může být tou nejlepší volbou. Zakryjte ho vhodným krytím. Alginát bude absorbovat exsudát a vytvoří na povrchu rány hydrofilní gel. Exsudát z rány se bude z tohoto gelového povrchu vypařovat, a proto je třeba v případě, kdy je exsudátu velké množství, zajistit, aby sekundární krytí nebránilo tomuto odpařovacímu procesu.

FREKVENCE VÝMĚN

Četnost výměny krytí závisí na typu a stavu rány. V případě infikovaných nebo silně secernujících ran by se mělo krytí obecně měnit každý den, ve fázi hojení se četnost může snížit na 2x týdně. Krytí vyměňte, pokud dojde k vyplnění rány exsudátem nebo nasycení sekundárního krytí exsudátem. Ránu hodnotěte vždy po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

ODSTRANĚNÍ KRYTÍ

Při odstranění krytí ALGISITE M vysoká pevnost za mokra většinou umožní, aby zůstalo v jednom kuse. Při použití u ran s velmi malým množstvím exsudátu se může krytí k ráně přilepit. V případě, že krytí nelze snadno odstranit, nasyťte ho fyziologickým roztokem a odstraňte.

DOPORUČENÍ K APLIKACI

Aby se krytí k rukavici nebo nástroji nepřichytilo, doporučujeme prsty či nástroj navlhčit sterilním fyziologickým roztokem.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Ujistěte se, že obal byl odstraněn ze všech záhybů, dutin apod. I když je krytí ALGISITE M vhodné k léčení ran náchylných k lehkému krvácení, není určeno k použití jako chirurgická houba nebo k zástavě krvácení silně krvácejících ran. Nepoužívejte u pacientů s prokázanou alergií na alginátové krytí.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66000519	ALGISITE M	5 x 5 cm	10 ks	bal
66000520	ALGISITE M	10 x 10 cm	10 ks	bal
66000521	ALGISITE M	15 x 20 cm	1 ks	ks
66000522	ALGISITE M	2 x 30 cm	5 ks	bal

Hydrokoloidní krytí

REPLICARE[◇] Ultra

Přizpůsobivé hydrokoloidní krytí je navrženo tak, aby vytvořilo a udrželo vlhké prostředí v ráně tím, že absorbuje exsudát a vytvoří na povrchu rány jemný gel.

- polyuretanová fólie umožňuje odpařování přebytečné vlhkosti a zvyšuje schopnost krytí absorbovat exsudát
- unikátní mikroténké hrany a vylepšené lepidlo nabízejí lepší přilnavost, snížený potenciál prosakování a pravděpodobnost rolování okraje
- může zůstat na místě až 7 dní
- tenké, flexibilní krytí – dobré přizpůsobení se tvaru těla
- snadná aplikace na problematické partie těla
- voděodolné, polopropustné pro kyslík
- bariéra vůči bakteriím
- celoplošně přilnavé

INDIKACE

- dekubity, bércové ulcerace, dehiscence
- popáleniny, odběrové plochy, kožní štěpy
- nepoužívejte krytí
- na ulcerace způsobené infekcí, jako jsou tuberkulóza, syfilis a hluboké plísňové infekce; na rány u pacientů s akutní vaskulitidou, jako jsou periarteritida nodosa, systémový lupus erythematosus a kryoglobulinémie
- popáleniny III. stupně
- krytí musí být odstraněno před radiační terapií

ODSTRANĚNÍ KRYTÍ

Vyčistěte ránu sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem, osušte. Aplikujte krytí na spodinu rány alespoň 1 cm přes okraj rány. Dobře přitlačte celou dlaní (zahřátím se rychleji aktivují hydrokoloidy). Krytí není nutné sekundárně krýt, ale na namáhaných místech krytí fixujte filmovým krytím (OPSITEFLEXIFIX nebo sekundárním krytím MELOLIN). Frekvence výměny je po 3 dnech nebo při prosáknutí sekundárního krytí. Ránu hodnotte po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66000434	REPLICARE ULTRA	10 x 10 cm	10 ks	bal

Enzymatické čištění ran

IRUXOL^o Mono

Mast s obsahem proteolytického enzymu kolagenázy.

Slouží k čištění ran netraumatickou metodou, cestou enzymového debridementu. Iruxol je určen pro enzymové čištění otevřených ran (odstranění nekrotické tkáně), včetně ulcerací a dekubitů. K zajištění enzymového účinku masti v ráně je nutná dostatečná vlhkost rány v průběhu léčby. Z toho důvodu musí být u suchých ran spodina zvlhčena fyziologickým roztokem (0,9% NaCl) nebo jiným roztokem, který je tkání dobře tolerován. Suché a tvrdé strupy musí nejdříve změkknout přiložením vlhkého obkladu. V případě infikovaných ran je možno kombinovat mast s antibiotiky kompatibilními s Iruxolem Mono (chloramfenikol, framycetin, neomycin, bacitracin, gentamycin, polymyxin B a makrolidy, jako např. erytromycin, mupirocin, clindamycin, sulfadiazin).

APLIKACE

1x denně nanést 2 mm silnou vrstvu masti prostřednictvím obvazu nebo přímým nanesením na lehce zvlhčený povrch rány. Je nutné zajistit dobrý kontakt vrstvy masti s povrchem rány. Na ránu není nutné nanášet větší vrstvu masti, protože čistící efekt se tím nezvýší. Okraje rány a zdravou pokožku je nutné chránit před možným podrážděním nejlépe použitím Secura spreje. Obvykle stačí vyměnit obvaz jednou denně. Zvýšení účinku masti může být dosaženo její aplikací dvakrát denně. Terapii bércových vředů Iruxolem Mono je vhodné doplnit tlakovým obvazem a při poruchách arteriální cirkulace a při terapii vředů diabetické nebo neurologické etiologie je vhodná doprovodná medikamentózní léčba.

UPOZORNĚNÍ

K potlačení aktivity kolagenázy dochází při současném použití antiseptik, těžkých kovů a mýdel. Antibiotika tyrothricin, gramicidin a tetracykliny by neměla být lokálně aplikována společně s Iruxolem Mono.



Kód	Popis produktu	Prodejní jednotka
66469010	Iruxol Mono 10 g	ks

Cadexomer s jódem

IODOSORB[◇]

Cadexomerový krém / prášek s jódem.

Cadexomer s jódem. Obsahuje 0,9 hmotnostních procent jódu.

- klinicky ověřená léčba infekcí
- širokospektrální antimikrobiální aktivita 72 hodin – potlačení infekce
- odstraňuje neživou tkáň a nečistoty, účinně odstraňuje hnis a detritus
- efektivně působí na biofilm
- vysoce absorpční – 1g Cadexomeru naváže na sebe 7 g exsudátu
- pomáhá eliminovat zápach tvořící bakterie až o 87 %.
- kontrolované uvolňování jódu, změna barvy: indikuje, kdy je zapotřebí vyměnit krytí
- neadherentní - umožňuje atraumatický převaz pomocí fyziologického roztoku
- podporuje hojení ran
- biologicky odbouratelný



INDIKACE

- chronické povleklé rány se středním až vysokým množstvím exsudátu
- rány s biofilmem na spodině
- dekubity, bércové ulcerace, diabetické defekty, dehiscence
- onkologické rány

APLIKACE

Vyčistěte ránu sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. Naneste 1–2 mm silnou vrstvu masti, prášek nasypete na spodinu rány v cca 3 mm silné vrstvě, plošné krytí přiložte. V případě použití na nízké secernující ránu, aplikujte na Iodosorb adekvátní množství INTRASITE gelu a překryjte vhodným sekundárním krytím ALLEVYN, MELOLIN nebo gázou. Lze použít kompresní terapii. V první hodině po aplikaci může IODOSORB přechodně vyvolat mírnou bolest. Ta znamená, že produkt začíná ránu čistit. IODOSORB může příležitostně vyvolat otok nebo zarudnutí kůže na okraji rány. To zarudnutí většinou zase rychle odezní. Kontakt s kůží na okraji rány a se zcela neporušenou kůží je třeba omezit na minimum použitím Secura spreje, eventuálně PROSHIELD Plus Skin Protectant ochranného krému.

VÝMĚNA

Frekvence výměn je po 3 dnech nebo při prosáknutí sekundárního krytí. Ránu hodnotte po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

KONTRAINDIKACE

IODOSORB se nesmí používat na suchou nekrotickou tkáň a u pacientů s přecitlivělostí na jód nebo na některou jinou v něm obsaženou látku. IODOSORB nelze používat u dětí, těhotných nebo kojících žen či pacientů s chorobami štítné žlázy či poruchami funkce ledvin (např. Hašimotova zánětlivého onemocnění štítné žlázy nebo při tvorbě netoxické strumy s uzlíky). Nepoužívejte mast IODOSORB v blízkosti očí, uší, nosu nebo úst.

VAROVÁNÍ

Existuje potenciální riziko interakce s lithiem, což by mělo za následek zvýšení pravděpodobnosti hypotyreózy. Nepoužívejte mast IODOSORB mast současně s antiseptiky obsahujícími rtuť nebo taurolidin. V případě, že má pacient absolvovat vyšetření funkce štítné žlázy, měl by informovat lékaře.

Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66001286	IODOSORB PRÁŠEK 3 g	—	7 ks	bal
66001290	IODOSORB PLOŠNÉ KRYTÍ 5 g	4 x 6 cm	5 ks	bal
66001291	IODOSORB PLOŠNÉ KRYTÍ 10 g	6 x 8 cm	3 ks	bal
66001292	IODOSORB PLOŠNÉ KRYTÍ 10 g	6 x 8 cm	5 ks	bal
66001293	IODOSORB PLOŠNÉ KRYTÍ 17 g	8 x 10 cm	2 ks	bal
66001297	IODOSORB MAST 20 g	—	2 ks	bal
66001299	IODOSORB MAST 40 g	—	1 ks	ks

Hydrogel – hydratace ran

INTRASITE[◇] Conformable

Netkaný materiál impregnovaný přípravkem INTRASITE Gel – sterilní.

Kombinuje výhody přípravku INTRASITE Gel s netkaným polyesterovým viskózním materiálem, který usnadňuje jemné ošetření ran.

Má jemný a přitom efektivní odstraňující a odvádějící účinek díky rehydrataci nekrotické tkáně a absorpci olupující se kůže. Také absorbuje přebytek exsudátu.


- snadno se přizpůsobuje tvarům rány
- udržuje vlhké prostředí na povrchu rány, zabraňuje přilnutí a umožňuje snadnou výměnu obvazu, aniž by došlo k poškození křehké nové tkáně
- podporuje přirozené hojení pomocí autolýzy
- poskytuje vlhké prostředí pro hojení ran
- není adherentní a nepoškozuje životaschopné tkáně nebo kůži obklopující rány
- rychlé autolytické odstranění nekrotické tkáně, velmi účinný, netraumatický
- podporuje granulaci
- absorbuje sekret a rozpadlou tkáň

INDIKACE

- popáleniny, onkologické rány, dehiscence, lacerace, exkoriace a defekty způsobené ozářením
- k odstranění neživé tkáně z mělkých i hlubokých ran
- dekubity, bércové vředy, diabetické defekty

APLIKACE

Vyčistěte ránu sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. Přiložte krytí, popřípadě natlačte do dutiny. Překryjte vhodným sekundárním krytím ALLEVYN, OPSITE FLEXIGRID nebo OPSITE FLEXIFIX. Frekvence výměn je po 3 dnech nebo při prosáknutí sekundárního krytí. Ránu hodnotte po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

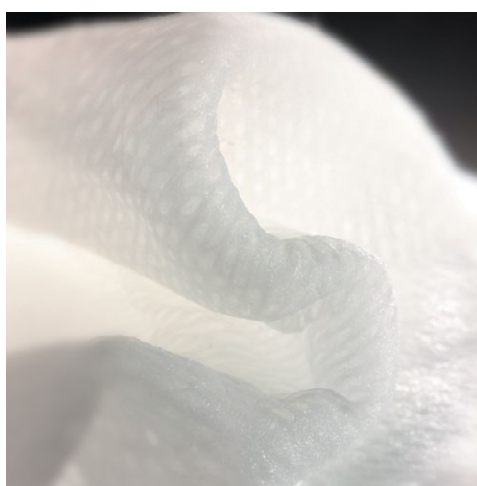

Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66000324	INTRASITE CONFORMABLE	10 x 10 cm	10 ks	bal
66000325	INTRASITE CONFORMABLE	10 x 20 cm	1 ks	ks
66000326	INTRASITE CONFORMABLE	10 x 40 cm	1 ks	ks

INTRASITE[◇] Gel

Netkaný materiál impregnovaný přípravkem INTRASITE Gel.

Čirý amorfnní hydrogel obsahující modifikovaný polymer karboxymethyl-celulózy, propylen-glykol a vodu. Sterilní v jednorázovém balení. Systém Applipak umožňuje snadnou, přesnou a řízenou aplikaci i na těžko dostupných místech.

- podporuje přirozené hojení pomocí autolýzy
- poskytuje vlhké prostředí pro hojení ran
- není adherentní a nepoškozuje životaschopné tkáně nebo kůži obklopující rány
- rychlé autolytické odstranění nekrotické tkáně, velmi účinný, netraumatický
- podporuje granulaci
- absorbuje sekret a rozpádne tkáň
- pevný, dobře ulpívající v místě aplikace
- bakteriostatický účinek
- usnadňuje opakovanou epitelizaci a vede ke zmenšení jizvy po vyléčení

INDIKACE

- k odstranění neživé tkáně z mělkých i hlubokých ran
- dekubity, bérkové ulcerace, diabetické defekty, píštěle
- onkologické rány, popáleniny, dehiscence, lacerace, exkoriace a defekty způsobené ozářením

APLIKACE

Vyčistěte ránu sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. Naneste 1–2 mm silnou vrstvu gelu, případně natlačte do dutiny. Překryjte vhodným sekundárním krytím ALLEVYN, OPSITE FLEXIGRID nebo OPSITE FLEXIFIX. Frekvence výměn po 3 dnech nebo při prosáknutí sekundárního krytí. Ránu hodnotte po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.



Kód	Popis produktu	Balení	Prodejní jednotka
66000240	INTRASITE GEL 15 g	5 ks	bal
7308	INTRASITE GEL 8 g	10 ks	bal
7311	INTRASITE GEL 15 g	1 ks	ks
7313	INTRASITE GEL 25 g	10 ks	bal

Antiseptické a kontaktní krytí

BACTIGRAS[◇]

Antiseptické neadhezivní krytí - sterilní.


- antiseptické krytí – gázová mřížka impregnovaná čistým bílým parafínem obsahujícím 0,5% chlorhexidin acetátu
- 10 cm² obsahuje 5 mg chlorhexidinu acetátu
- chlorhexidin acetát je osvědčené antiseptikum účinné proti široké řadě bakterií včetně MRSA
- dostupné v řadě praktických velikostí, krytí lze snadno stříhat i s proloženými listy
- jemný a nepřilnavý, umožňuje volnou pasáž exsudátu
- brání kolonizaci – prevence infekce rány
- ekonomicky výhodná profylaxe a léčba ran

INDIKACE

- na primární sutury – prevence infekce
- dekubity, bérkové ulcerace, diabetické defekty, dehiscence, odřeniny
- popáleniny menšího rozsahu (do 10 % plochy), odběrové plochy, kožní štěpy, místa transplantace
- infikované rány
- okolí drénů a žilních vstupů
- onkologické rány

APLIKACE

Vyčistěte ránu sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. Aplikujte krytí na spodinu rány. Překryjte vhodným sekundárním krytím (ALLEVYN, MELOLIN, gáza). Frekvence výměn je po 3 dnech nebo při prosáknutí sekundárního krytí. Ránu hodnotte po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

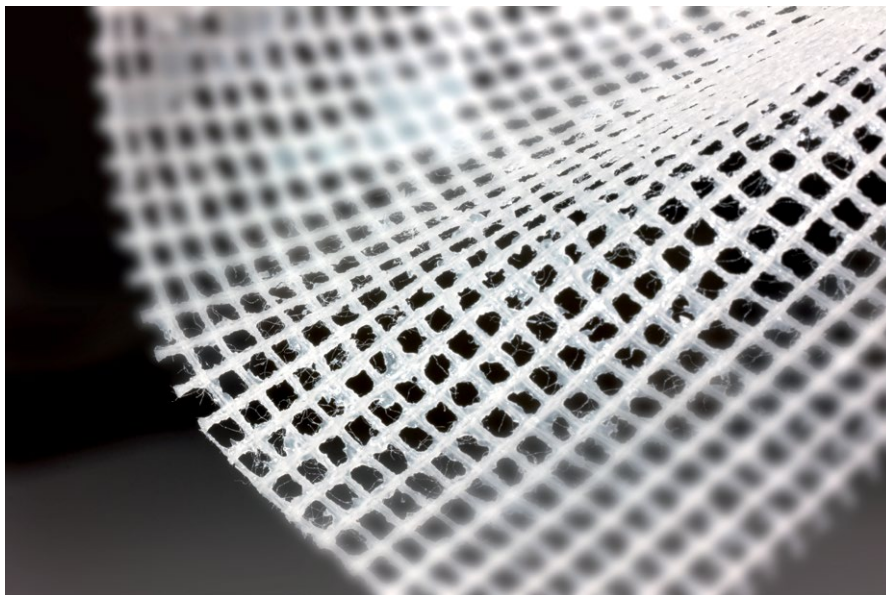

Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
7456	BACTIGRAS	5 x 5 cm	50 ks	bal
7457	BACTIGRAS	10 x 10 cm	10 ks	bal
7461	BACTIGRAS	15 x 20 cm	1 ks	ks
66007505	BACTIGRAS	15 cm x 1 m – role	1 ks	ks
66003661	BACTIGRAS	10 x 40 cm	10 ks	bal

JELONET[◇]

Neadhezivní mastný tyl – sterilní.

Neadhezivní mastný tyl impregnovaný čistým bílým parafínem pro povrchová poranění. Mřížka je vyrobena ze spletených vláken, při stříhání se netřepí.


- atraumatické převazy
- vlákna se netřepí, krytí lze stříhat
- umožňuje volnou pasáž exsudátu
- k dispozici jsou různá balení: jednotlivé kusy krytí pro aseptickou aplikaci, vaničky nebo role pro pohodlné použití na větší plochy

INDIKACE

- menší popáleniny a opařeniny
- odběrové plochy, kožní štěpy, ztráta kožního krytu, lacerace a odřeniny
- chronické rány – neobsahuje léčivé látky, a je tedy ideální pro použití s lokálním antiseptikem nebo antibiotikem podle vlastního výběru

APLIKACE

Vyčistěte ránu sterilní vodou nebo fyziologickým roztokem. Aplikujte krytí na spodinu rány. Překryjte vhodným sekundárním krytím (ALLEVYN, MELOLIN, gáza). Frekvence výměn po 3 dnech nebo při prosáknutí sekundárního krytí. Ránu hodnotte po očištění oplachovým roztokem nebo vodou.

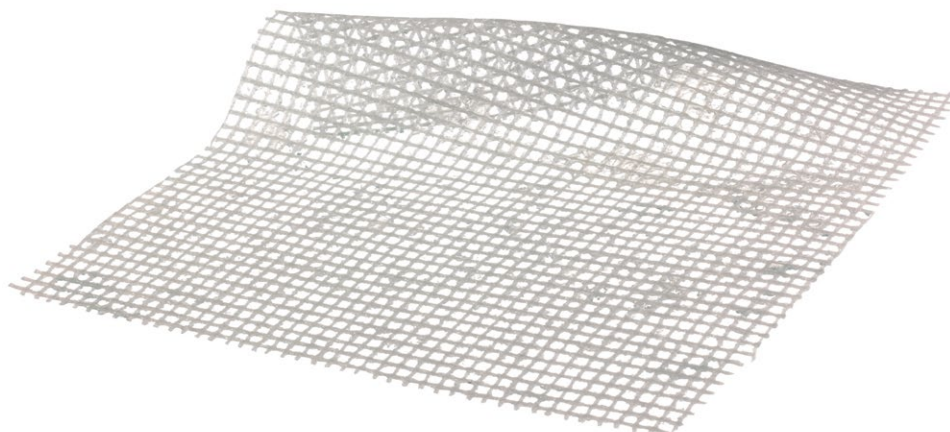


Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
7403	JELONET 5 x 5 cm	5 x 5 cm	50 ks	bal
7404	JELONET 10 x 10 cm	10 x 10 cm	10 ks	bal
7409	JELONET 10 x 10 cm	10 x 10 cm	100 ks	bal
7459	JELONET	10 x 40 cm	1 ks	ks
7415	JELONET	15 x 2 m - role	1 ks	ks
66007478	JELONET	10 x 10 cm	36 ks	bal
66007477	JELONET (Hospital Dispenser Pack)	10 cm x 7 m	1 ks	ks

CUTICERIN[◇]

Acetátová neadhezivní mřížka s neutrální, hydrofobní mastí s Euceritem na povrchu, vhodná pro ošetření popálenin, odřenin a ran s povrchovou ztrátou pokožky. Krytí je sterilní.

- impregnovaná jemná acetátová vlákna snižují riziko prorůstání granulační tkáně přes krytí
- poskytuje bezbolestné a snadné odstranění
- propustný pro vzduch a exsudát

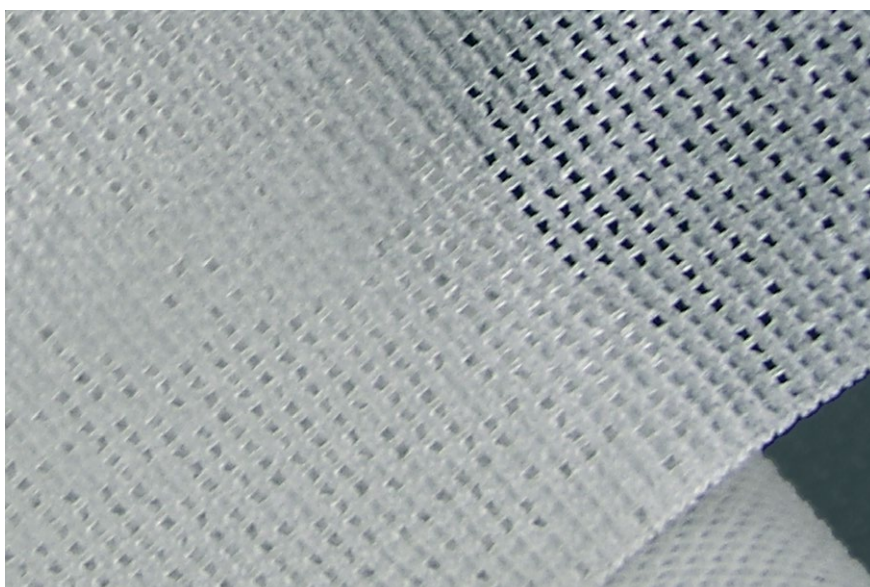

Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66045562	CUTICERIN	7,5 x 7,5 cm	10 ks	bal
66045560	CUTICERIN	7,5 x 7,5 cm	50 ks	bal
66045563	CUTICERIN	7,5 x 20 cm	1 ks	ks
66045561	CUTICERIN	7,5 x 20 cm	50 ks	bal
66045502	CUTICERIN	20 x 40 cm	1 ks	ks

Neadhezivní krytí na rány

MELOLIN[◇]

Absorpční krytí s nízkou adhezí.

Neadhezivní vrstvené krytí na rány vyrobené z bavlny a polyesterových vláken s hydrofobní podpůrnou vrstvou s nepřilnavou kontaktní vrstvou.

- jemně přilnavá, perforovaná kontaktní vrstva
- vysoce absorpční, hydrofobní vrstva
- lze upravit na požadovanou velikost
- sterilní i nesterilní forma

INDIKACE

- pooperační rány
- akutní rány, odřeniny, popáleniny
- na rány s velkým množstvím exsudátu
- lze použít jako sekundární krytí

APLIKACE

Krytí aplikujte lesklou stranou na ránu. Fixujte pomocí obinadla nebo náplastí. Výměna krytí při prosáknutí.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66974932	MELOLIN 5 x 5 cm	5 x 5 cm	25 ks	bal – sterilní
66974940	MELOLIN 5 x 5 cm	5 x 5 cm	100 ks	bal – sterilní
66974933	MELOLIN 10 x 10 cm	10 x 10 cm	10 ks	bal – sterilní
66974941	MELOLIN 10 x 10 cm	10 x 10 cm	100 ks	bal – sterilní
66974939	MELOLIN 10 x 20 cm	10 x 20 cm	1 ks	ks – sterilní
66974942	MELOLIN 10 x 10 cm	10 x 10 cm	150 ks	bal – nesterilní
66974943	MELOLIN 10 x 20 cm	10 x 20 cm	75 ks	bal – nesterilní
66974944	MELOLIN 20 x 30 cm	20 x 30 cm	25 ks	bal – nesterilní
66974930	MELOLIN 50 x 7 m	50 x 7 m	1 ks	ks – nesterilní

MELOLITE[◇]

Absorpční krytí s nízkou adhezí – sterilní.

Tenší neadhezivní absorpční polštářek na rány. Krytí je sterilní, lze upravit na požadovanou velikost.

- neadhezivní, perforovaná vrstva na obou stranách
- absorpční, hydrofobní vrstva

INDIKACE

- krytí na pooperační rány
- jako první pomoc, např. na sutury, škrábance, odřeniny, popáleniny malého rozsahu
- jako sekundární krytí

APLIKACE

Krytí aplikujte na ránu. Fixujte pomocí obinadla nebo náplastí. Krytí vyměňte při prosáknutí.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
4811	MELOLITE	5 x 7,5 cm	100 ks	bal
4812	MELOLITE	10 x 7,5 cm	100 ks	bal
4814	MELOLITE	20 x 7,5 cm	100 ks	bal

Filmové krytí

OPSITE[◇] FLEXIFIX

Transparentní film v roli – nesterilní.

Průhledné polyuretanové filmové krytí prostupné pro vodní páry. MVTR 850 ml/m²/24 hodin.

- prodyšné, odolné vůči vodě a bakteriím
- nová technologie snižuje tření mezi tělem pacienta a podpěrným povrchem
- minimalizuje poškození kůže
- ekonomicky výhodné, jednoduché použití
- flexibilní mapovací mřížka pro přesnou dokumentaci rány
- snadné a atraumatické odstranění

INDIKACE

- jako primární krytí – ochrana pokožky
- sekundární krytí na fixaci krytí
- okluzivní krytí při aplikaci hydrogelu
- prevence proti třecím silám

APLIKACE

Filmové krytí používejte na suchou a odmaštěnou pokožku. Pro odstranění krytí opatrně táhněte ve směru paralelně s pokožkou.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66000040	OPSITE FLEXIFIX	5 cm x 10 m	1 ks	ks
66000041	OPSITE FLEXIFIX	10 cm x 10 m	1 ks	ks
66000375	OPSITE FLEXIFIX	15 cm X 10 m	1 ks	ks

OPSITE[◇] FLEXIFIX Gentle

Transparentní silikonový adhezivní film v roli.

Jemné silikonové krytí v roli s výbornou adhezí, vysokou prodyšností a dobou použitelnosti až 7 dnů. Film je transparentní, což umožňuje sledování místa aplikace bez nutnosti snímání silikonového krytí.

- přizpůsobivé a elastické
- snadná aplikace
- ekonomická výhodnost, lze opakovaně aplikovat
- atraumatická výměna
- balení v roli – lze upravit na požadovanou velikost
- nízký profil – minimalizace tření

INDIKACE

- prevence u pacientů s rizikem vzniku dekubitů
- ideální pro pacienty s křehkou kůží
- fixace sond, katétrů
- využití pod sádrové obvazy a ortézy
- široké využití u nedonošených novorozenců (prevence, fixace)
- k ochraně pokožky v okolí stomie

APLIKACE

Zvolte šířku a délku krytí podle potřeby. Krytí lze stříhat. Aplikujte vždy na osušenou pokožku. Krytí lze opakovaně použít bez ztráty adheze. Zabezpečuje zcela netraumatickou výměnu. Pacienta lze s krytím sprchovat.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66801195	OPSITE FLEXIFIX Gentle	2,5 cm x 5 m	1 ks	ks
66801196	OPSITE FLEXIFIX Gentle	5 cm x 5 m	1 ks	ks
66801197	OPSITE FLEXIFIX Gentle	10 cm x 5 m	1 ks	ks

OPSITE[◇] FLEXIGRID

Prodyšný paropropustný lepicí film – sterilní.

Průhledné polyuretanové filmové krytí prostupné pro vodní páry.
MVTR 850 ml/m²/24 hodin.


- prodyšné, odolné vůči vodě a bakteriím
- sterilní forma
- minimalizuje poškození kůže
- ekonomicky výhodné, jednoduché použití
- jedinečná mapovací mřížka pro přesnou dokumentaci rány
- snadné atraumatické odstranění

INDIKACE

- krytí povrchových poranění (např. mírné popáleniny, povrchové rány, oděrky)
- jako primární krytí – ochrana pokožky
- sekundární krytí
- okluzivní krytí při aplikaci Intrasite Gelu
- ochranu pokožky proti tření a vnější kontaminaci
- fixaci katétrů
- povrchové tlakové ulcerace a jejich profylaxe
- pooperační rány

APLIKACE

Filmové krytí používejte na suchou a odmaštěnou pokožku. Pro odstranění krytí opatrně táhněte ve směru paralelně s pokožkou.

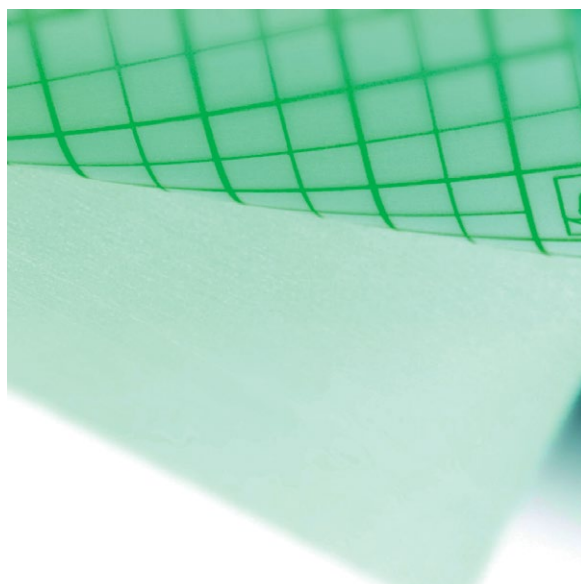

Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
4628	OPSITE FLEXIGRID	6 x 7 cm	100 ks	bal
4629	OPSITE FLEXIGRID	10 x 12 cm	10 ks	bal
4630	OPSITE FLEXIGRID	10 x 12 cm	50 ks	bal
4631	OPSITE FLEXIGRID	15 x 20 cm	10 ks	bal
4632	OPSITE FLEXIGRID	25 x 12 cm	20 ks	bal

OPSITE[◇] Spray

Transparentní krytí ve spreji.

Prodyšný, průhledný, voděodolný, rychleschnoucí film ve spreji.

- propustný pro kyslík a vodní páry
- dovoluje okolní kůži dýchat a zabraňuje tím maceraci
- přizpůsobivý a elastický – na kloubech zůstává neporušený
- snadná aplikace
- ekonomická výhodnost
- ošetřené místo lze sprchovat či omývat

INDIKACE

- povrchové rány, sutury, např. po chirurgickém zákroku
- ochrana pokožky proti tření v predilekčních místech
- ochrana pokožky u inkontinentních pacientů
- k aplikaci do okolí ran – ochrana před macerací exsudátem
- zlepšení adheze krytí
- k utěsnění externích fixačních prostředků (Steinmanovy hřeby)
- po odstranění stehů
- na neporušené puchýře
- po aplikaci vakcín

APLIKACE

Místo před aplikací osušte. Aplikujte ze vzdálenosti cca 15 cm rovnoměrně na pokožku. Můžete aplikovat v několika vrstvách. Každou vrstvu nechte zaschnout. Krytí se po několika dnech samovolně sloupne nebo v případě potřeby odstranění použijte odstraňovač náplasti ubrousky REMOVE.



Kód	Popis produktu	Balení	Prodejní jednotka
66004978	OPSITE SPRAY AEROSOL CAN	100 ml	ks
66004980	OPSITE SPRAY AEROSOL CAN	240 ml	ks

Incizní fólie

OPSITE[◇] Incise

Průhledný, adhezivní polyuretanový film, který dovoluje pokožce dýchat a zabraňuje tak tvorbě vlhkosti pod krytím.

Fólie během dlouhých chirurgických zákroků drží na okolní kůži a zejména na okraji rány.

- vynikající přilnavost až k místu okraje rány
- průhledný, minimálně lesklý povrch
- velmi elastická, bezpečně drží i u dlouho trvajících operací
- odolná proti bakteriím a vodě
- vysoce prodyšný film, dokonale odvádí vlhkost

INDIKACE

- prevence u pacientů s rizikem vzniku dekubitů
- ideální pro pacienty s křehkou kůží
- fixace sond, katétrů
- využití pod sádrové obvazy a ortézy
- široké využití u nedonošených novorozenců (prevence, fixace)
- k ochraně pokožky v okolí stomie

APLIKACE

Zvolte šířku a délku krytí podle potřeby. Krytí lze stříhat. Aplikujte vždy na osušenou pokožku. Krytí lze opakovaně použít bez ztráty adheze. Zabezpečuje zcela netraumatickou výměnu. Pacienta lze s krytím sprchovat.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
4975	OPSITE INCISE	10 x 14 cm	50 ks	bal
4967	OPSITE INCISE	14 x 25 cm	20 ks	bal
4986	OPSITE INCISE	15 x 28 cm	10 ks	bal
4987	OPSITE INCISE	30 x 28 cm	10 ks	bal
4988	OPSITE INCISE	45 x 28 cm	10 ks	bal
4989	OPSITE INCISE	45 x 55 cm	10 ks	bal
4994	OPSITE INCISE	56 x 84 cm	10 ks	bal
4995	OPSITE INCISE	40 x 42 cm	10 ks	bal

**Pooperační, fixační krytí,
zabezpečení drénů**

CICAPLAIE[◇]

Fixační krytí s absorbčním polštářkem, hypoalergenní.

- neadherentní
- vysoce savý absorpční polštářek
- elastická fixační náplast
- atraumatické výměny

INDIKACE

- pooperační rány
- akutní rány



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66660272	CICAPLAIE	5 x 7 cm	100 ks	bal
66660273	CICAPLAIE	10 x 8 cm	50 ks	bal
66660274	CICAPLAIE	15 x 10 cm	50 ks	bal
66660275	CICAPLAIE	20 x 10 cm	50 ks	bal
66660276	CICAPLAIE	25 x 10 cm	25 ks	bal
66660277	CICAPLAIE	30 x 10 cm	25 ks	bal
66660278	CICAPLAIE	35 x 10 cm	25 ks	bal

OPSITE[◇] Post-Op

Krytí s absorpčním polštářkem – sterilní.

Pooperační krytí kombinující fólii s vysokou rychlostí přenosu vlhkosti (Moisture Vapour Transmission Rate, MVTR) Hydrofilní polyuretanový film má vlastnosti REACTIC, které se „zapínají“, pokud je přítomna vlhkost, což umožňuje, že se veškeré přebytky odpaří do prostředí.

- odolný vůči bakteriím a vodě
- snížená frekvence výměn díky vysoce propustnému filmu
- průhledný film umožňuje snadnější sledování okolí rány
- elastický a pohodlný
- atraumatické výměny

INDIKACE

- pooperační rány – všechny typy
- akutní rány a odřenyiny



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66000709	OPSITE Post-Op	9,5 x 8,5 cm	20 ks	bal
66000708	OPSITE Post-Op	5 x 6,5 cm	100 ks	bal
66000710	OPSITE Post-Op	10 x 12 cm	10 ks	bal
66000712	OPSITE Post-Op	15,5 x 8,5 cm	20 ks	bal
66000713	OPSITE Post-Op	20 x 10 cm	20 ks	bal
66000714	OPSITE Post-Op	25 x 10 cm	20 ks	bal
66000715	OPSITE Post-Op	30 x 10 cm	20 ks	bal
66000716	OPSITE Post-Op	35 x 10 cm	20 ks	bal

OPSITE[◇] Post-Op Visible

OPSITE[◇] Drain Dressing


Voděodolné krytí odolné proti bakteriím, s průhledným absorpčním polštářkem.

Filmové krytí s pěnovou mřížkou na rány připomínající včelí plástev, s průhledným ochranným filmem. Unikátní a inovativní design krytí umožňuje neustálé sledování rány bez nutnosti narušení procesu hojení kvůli nadbytečným výměnám.

- neustálý monitoring rány
- vysoká absorpční kapacita, minimalizace rizika macerace
- poskytuje nepropustnou bariéru proti bakteriím včetně MRSA
- propustné pro kyslík, voděodolné
- na ráně zůstává až 7 dnů
- snižuje náklady na materiál a šetří čas personálu
- vysoce komfortní pro pacienta

INDIKACE

- pooperační rány ortopedické, traumatické, chirurgické (kardiochirurgické, břišní, cévní, neurochirurgické)
- tržné rány
- řezné rány
- odřeniny
- k ošetření okolí drénů
- speciálně konstruováno pro málo až středně exsudativní akutní rány, lacerace, drobné řezy a drobné popáleniny

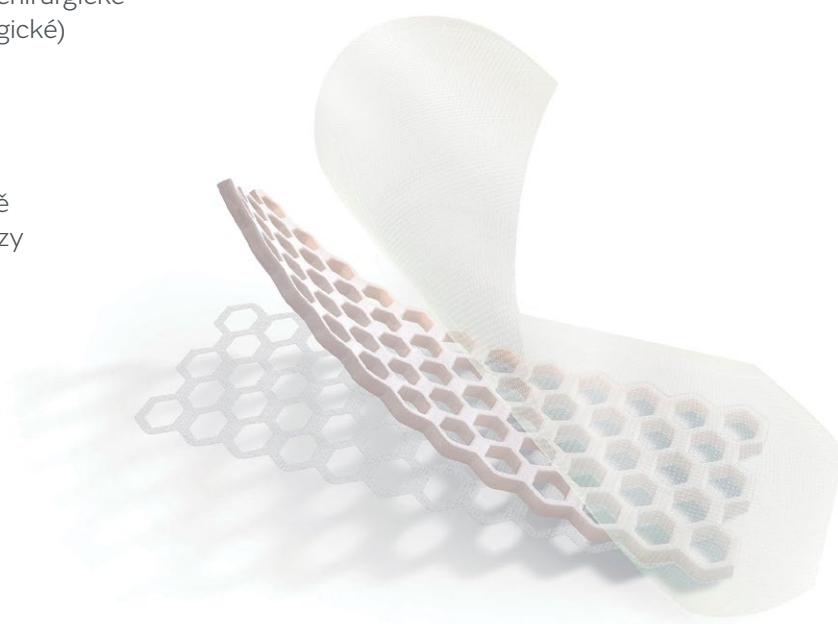

Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800136	OPSITE Post-Op Visible	10 x 8 cm	20 ks	bal
66800137	OPSITE Post-Op Visible	15 x 10 cm	20 ks	ks
66800138	OPSITE Post-Op Visible	20 x 10 cm	20 ks	ks
66800139	OPSITE Post-Op Visible	25 x 10 cm	20 ks	ks
66800140	OPSITE Post-Op Visible	30 x 10 cm	20 ks	ks
66800141	OPSITE Post-Op Visible	35 x 10 cm	20 ks	ks
66800842	OPSITE Drain Dressing	10 x 9 cm	20 ks	bal

PRIMAPORE[◇]

Absorpční krytí s adhezivním krajem – sterilní.

Krytí je velmi měkké a přizpůsobivé, takže je pohodlné na nošení a zároveň chrání ránu před dalšími traumaty. Velmi dobře tolerováno kůží díky porézní vrstvě.

INDIKACE

- krytí pooperačních nebo akutních ran



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
7133	PRIMAPORE	7,2 x 5,0 cm	100 ks	bal
7135	PRIMAPORE	8,3 x 6,0 cm	50 ks	bal
66000317	PRIMAPORE	10 x 8 cm	20 ks	bal
66000318	PRIMAPORE	15 x 8 cm	20 ks	bal
66000319	PRIMAPORE	20 x 10 cm	20 ks	bal
66000320	PRIMAPORE	25 x 10 cm	20 ks	bal
66000321	PRIMAPORE	30 x 10 cm	20 ks	bal

Uzavírání ran

LEUKOCLIP[◇] SD

Kožní stapler. Rychlá a precizní sutura rány pomocí klipů.

- svorky ve tvaru B s přesně obroušovaným hrotem zaručují jemný vpich
- zakulacené postranní části svorek – netraumatizují okolní tkáň
- ekonomicky efektivní
- jasná kontrola okrajů rány
- opakovaně použitelná resterilizovatelná rukojeť – použití minimálně 100x
- zásobník obsahující 10, 20 nebo 35 svorek

INDIKACE

- sutura rány
- pro fixaci transplantátu kůže

Odstraňování svorek bez poranění díky speciálnímu extraktoru **LEUKOCLIP Stapler** pro odstraňování LEUKOCLIP SD svorek.

- odstraňování svorek bez poranění
- resterilizovatelný



Kód	Popis produktu	Balení	Prodejní jednotka
66047111	LEUKOCLIP SD – aplikátor		ks
66047112	ZÁSOBNÍK SVOREK	20 ks	ks
66047113	ZÁSOBNÍK SVOREK	35 ks	ks
66047114	ZÁSOBNÍK SVOREK	10 ks	ks
66001201	LEUKOCLIP – extraktor svorek	15 ks	bal

LEUKOSTRIP[◇]


Náplastové stehy.

Sterilní náplastové stehy pro uzavření rány z elastické textilie s hypoalergenním lepidlem.
V bílé nebo tělové barvě.

- minimální zjizvení
- adaptace rány bez napětí, po odeznění otoku se přizpůsobí novým podmínkám
- spolehlivá přilnavost, prodyšné

INDIKACE

- primární a sekundární uzavření ran
- podpora a úleva pro intrakutánní stehy

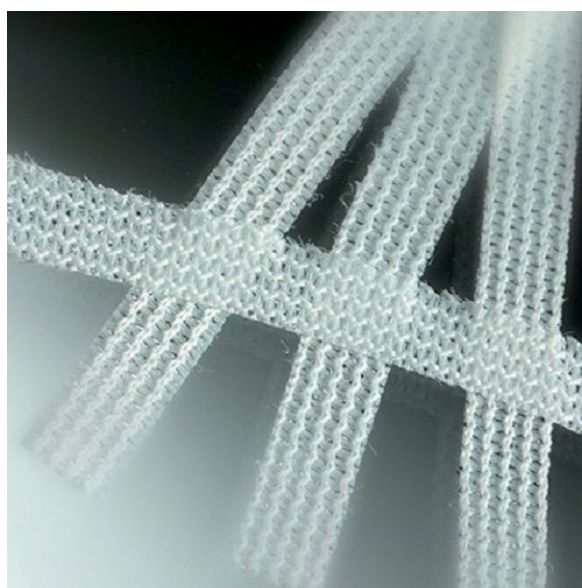

Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66002876	NÁPLAŠTOVÉ STEHY BÍLÉ	4,0 x 38,0 mm	8 stehů na blistru, 50 blistrů v balení	bal
66002878	NÁPLAŠTOVÉ STEHY BÍLÉ	6,4 x 76,0 mm	3 stehy na blistru, 50 blistrů v balení	bal
66002879	NÁPLAŠTOVÉ STEHY BÍLÉ	6,4 x 102,0 mm	5 stehů na blistru, 50 blistrů v balení	bal
66002880	NÁPLAŠTOVÉ STEHY BÍLÉ	13,0 x 102,0 mm	6 stehů na blistru, 50 blistrů v balení	bal
66002881	NÁPLAŠTOVÉ STEHY BÍLÉ	26,0 x 102,0 mm	4 stehy na blistru, 25 blistrů v balení	bal
66002882	NÁPLAŠTOVÉ STEHY TĚLOVÉ	4,0 x 38,0 mm	4 stehy na blistru, 50 blistrů v balení	bal
66002883	NÁPLAŠTOVÉ STEHY TĚLOVÉ	6,4 x 76 mm	3 stehy na blistru, 50 blistrů v balení	bal

Krytí I. V. vstupů

IV3000[◇]

Filmové krytí pro kanyly a fixaci katétru.

Vysoce prodyšné, průhledné membránové krytí reagující na vlhkost, krytí je speciálně navrženo tak, aby splňovalo požadavky na fixaci katétru a ochrany místa intravenózního vstupu. Díky unikátnímu adhezivnímu systému mřížky zabezpečuje atraumatickou výměnu či odstranění. Plně odpovídá mezinárodním pokynům, které se týkají intravenózní léčby ICNA a EPIC.

- Adhezivní vrstva IV3000 nezpůsobuje alergie.
- Součástí krytí jsou 2ks sterilních zajišťovacích proužků a záznamový štítek
- Snižuje riziko flebitidy a katéetrové sepse, poskytuje bariéru vůči nozokomiálním infekcím
- MVTR 14000 g/ m²/ 24 hodin při teplotě 37 stupňů C.

INDIKACE

Výše uvedený výrobek je vhodný pro fixaci katétrů a portů přímo na kůži.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66004011	IV3000 1 HAND, pediatrické	5 x 6 cm	100 ks	bal
4006	IV3000 1 HAND, periferní s křídélky	7 x 9 cm	100 ks	bal
4007	IV3000 1 HAND, periferní bez křídélek	6 x 7 cm	100 ks	bal
4008	IV3000 1 HAND, centrální	10 x 12 cm	50 ks	bal
66004009	IV3000 1 HAND, periferní, centrální, jugulární s křídélky	9 x 12 cm	50 ks	bal
4923	IV3000 STANDARD, periferní s křídélky	6 x 8 cm	100 ks	bal
4924	IV3000 STANDARD, periferní bez křídélek	6 x 8,5 cm	100 ks	bal
4925	IV3000 STANDARD, centrální	10 x 14 cm	10 ks	bal
4973	IV3000 STANDARD, centrální	10 x 14 cm	50 ks	bal
4649	IV3000 STANDARD, centrální, epidurální	10 x 20 cm	50 ks	bal
59410082	IV3000 periferní s okénkem	6 x 7 cm	100 ks	bal
59410882	IV3000 centrální kanyly s okénkem	10 x 12 cm	50 ks	bal
66047717	APPLICA I. V. 100 periferní textilní IV krytí	8 x 6 cm	50 ks	bal

1 HAND – opatřeno proužky a štítkem



Velikost: 6 cm x 7 cm
Objednávkový kód: 4007
Množství: 100
Doporučené indikace: Periferní



Velikost: 7 cm x 9 cm
Objednávkový kód: 4006
Množství: 100
Doporučené indikace: Por/periferní



Velikost: 9 cm x 12 cm
Objednávkový kód: 66004009
Množství: 50
Doporučené indikace: Centrální/Jugulární/PICC



Velikost: 10 cm x 12 cm
Objednávkový kód: 4008
Množství: 50
Doporučené indikace: Centrální/PICC

POZNÁMKA: kódy 4006/4007/4008 jsou opatřeny 2 sterilními ochrannými proužky a dokumentačním štítkem.

Krytí opatřené oranžovým okrajem – standard



Velikost: 10 cm x 20 cm
Objednávkový kód: 4649
Množství: 50
Doporučené indikace: Centrální/epidurální



Velikost: 10 cm x 14 cm
Objednávkový kód: 4925
Množství: 10
Doporučené indikace: Centrální/PICC



Velikost: 10 cm x 14 cm
Objednávkový kód: 4973
Množství: 50
Doporučené indikace: Centrální/PICC

Krytí s rámečkem



Velikost: 6 cm x 7 cm
Objednávkový kód: 59410082
Množství: 100
Doporučené indikace: Periferní



Velikost: 10 cm x 12 cm
Objednávkový kód: 59410882
Množství: 50
Doporučené indikace: Centrální/PICC

Biosyntetická a silikonová krytí na rány

BIOBRANE[◇]

Dočasná náhrada kůže.

Dočasná náhrada kůže vyrobená z vnější silikonové membrány s navázanou nylonovou síťovinou. Nylonová vrstva směřující k ráně se skládá z komplexní 3D struktury, k níž jsou kovalentně navázány kolagenové peptidy. Krev a sérum se spojují v nylonové matici a navíc připevní náhradu kůže k ráně.

- polopropustná struktura umožňuje průchod exsudátu z rány, krytí zůstává na ráně až do vytvoření epitelu
- díky speciálnímu trojvláknému nylonu zajišťuje 3D (trojrozměrná) matice bezpečné přilnutí, např. u popálenin II. stupně (2a,2b), míst odstraňování štěpeného transplantátu kůže nebo toxické epidermální nekrolýzy (TENS)
- méně složitý jednovláknový nylon používaný v BIOBRANE-L zajišťuje, aby biosyntetická náhrada kůže přilnula méně, např. v případě štěpených transplantátů
- k dispozici je speciální tvar rukavic ve čtyřech velikostech; tyto lze upravit podle potřeby
- podporuje rychlejší hojení rány
- vnější silikonová membrána tvoří bariéru pro vlhkost
- ekonomicky efektivní díky snížení počtu výměn krytí
- minimalizuje bolest při hojení
- průhlednost umožňuje přímou kontrolu rány
- umožňuje rychlejší návrat ke každodenním aktivitám
- snadno se aplikuje a odstraňuje, může být použito na rozsáhlých oblastech těla



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800174	BIOBRANE	13 x 13 cm	5 ks	bal
66800175	BIOBRANE	13 x 38 cm	5 ks	bal
66800176	BIOBRANE	25 x 38 cm	5 ks	bal
66800177	BIOBRANE	38 x 51cm	1 ks	ks
66800181	BIOBRANE RUKAVICE	dětská	2 ks	bal
66800182	BIOBRANE RUKAVICE	malá	2 ks	bal
66800183	BIOBRANE RUKAVICE	střední	2 ks	bal
66800184	BIOBRANE RUKAVICE	velká	2 ks	bal

CICA-CARE[◇]

Adhezivní silikonové krytí pro ošetření jizev.

Měkký, samolepicí, okluzivní silikonový plátek vyrobený z medicínálního silikonu zpevněný silikonovou membránou.

- patentovaná materiálová adhezivní technologie
- samopřilnavé, komfortní, atraumatické
- prokazatelně účinný při vyrovnávání, změkčování a vyblednutí červených a vyvýšených jizev – 90% účinnost
- vysoká účinnost u hypertrofických jizev a keloidních jizev
- kombinace gelu se silikonovou membránou zvyšuje odolnost
- krytí je trvanlivější a méně náchylné k drobení
- opakovaně použitelné, aplikace až 40x
- vysoce flexibilní – dobrá přilnavost na problémových místech

INDIKACE

- prevence tvorby hypertrofických a keloidních jizev u čerstvě zhojených ran
- pooperační jizvy po odstranění stehů
- ošetření starých hypertrofických jizev a keloidů

APLIKACE

Krytí upravte tak, aby jeho velikost odpovídala velikosti jizvy. Přiložte na jizvu přilnavou stranou. I když je krytí přilnavé, použijte na namáhaných místech k fixaci obvaz. Pro lepší aklimatizaci kůže zvolte postupnou aplikaci, tj. první dva dny 4 hodiny denně, další dva dny 8 hodin denně. Krytí používejte následně 24 hodin denně. Při snížení adheze krytí omyjte vodou se slabým mýdlovým roztokem, dobře opláchněte a nechte osušit. Pak krytí aplikujte znovu. Krytí vydrží až 40 aplikací.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66250704	CICA CARE	6 x 12 cm	1 ks	ks
66250706	CICA CARE	12 x 15 cm	1 ks	ks
66250707	CICA CARE	12 x 15 cm	10 ks	bal

Ochranné prostředky

PROSHIELD[◊]

Čisticí a hydratační pěna-sprej.

Jemný čisticí a hydratační přípravek s neutrálním pH neobsahující aerosol, který se neoplachuje a který minimalizuje podráždění pokožky pacienta. Složení tohoto výrobku je navrženo tak, aby pomáhal eliminovat nepříjemný odér a rozkládal suchou stolici, čímž se snižuje potřeba otírat jemnou tkáň pokožky.

INDIKACE

- čištění nepoškozené i poškozené pokožky spojené s častým závažným nebo chronickým průjmem či inkontinencí
- odstranění moči a stolice, suché krve, pooperačních antiseptických roztoků a dalších těžko odstranitelných nečistot z kůže pacienta
- odstranění kožních bariér, např. Proshield Plus Skin Protectant
- k odstranění pozůstatků lepidel fixačních materiálů ze sond, katétrů

APLIKACE

Před prvním použitím nejprve aktivujte trysku jedním nebo dvojitým stlačením hlavice spreje. Pokud chcete použít pěnovou konzistenci, otočte trysku do pozice „ON“ a vytáhněte její konec směrem dopředu. Pro použití sprejové konzistence zatlačte konec trysky zpět. Pro čištění pokožky při inkontinenci nastříkejte PROSHIELD Pěna & Sprej na postižené místo a otřete. PROSHIELD Pěna & Sprej se aplikuje před použitím ochranného přípravku na pokožku, jako je např. PROSHIELD Plus.

Není nutno oplachovat ani používat zvláštní hydratační přípravky.



Kód	Popis produktu	Balení	Prodejní jednotka
8213-0150-08	PROSHIELD PĚNA & SPRAJ	235 ml	ks

PROSHIELD[◇] Plus

Prostředek PROSHIELD Plus Skin Protectant – ochrana kůže.

Aktivní složka: Dimethicone 1 %.

Viskózní, mastný, chránící krém bez vůně, vhodný pro každodenní použití.
Dobře přilne k vlhké a suché pokožce a jde snadno odstranit.

INDIKACE

- pomáhá předcházet vzniku odřené, popraskané a suché pokožky a chránit ji
- účinná bariéra proti podráždění kůže
- vhodné pro každodenní použití jako preventivní opatření na ochranu zdravé neporušené kůže, která je vystavena účinkům inkontinence
- pomáhá snížit riziko dermatitidy spojené s inkontinencí

APLIKACE

Pouze k zevnímu použití. Aplikujte tak často, jak je třeba. Při použití tohoto výrobku se vyhněte kontaktu s očima. Nepoužívejte na hluboké rány, kousnutí zvířete, vážné popáleniny.

Pokud se stav zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, poraďte se s lékařem.



Kód	Popis produktu	Balení	Prodejní jednotka
8213-0300-04	PROSHIELD PLUS SKIN PROTECT KRÉM	4 oz	ks

SECURA[◇] No-Sting Barrier Film

NO-STING SKIN-PREP[◇] Protective

Ochrana kůže.

Nedráždivý bariérový film SECURA je prostředek pro ochranu kůže v tekuté formě bez obsahu alkoholu.

- chrání již porušenou, zmacerovanou kůži před drážděním
- rychle zasychá během 30 sekund
- vytváří flexibilní, průhledný film nepropustný pro vodu a bakterie, polopropustný pro kyslík
- chrání také celistvost pokožky před traumatem během odstraňování samolepicích pásek a adhezivních prostředků
- prostředek lze používat u donošených dětí od 1 měsíce věku
- má nedráždivé složení bez alkoholu, které snižuje pocit štípání na poraněné pokožce
- neobsahuje latex ani konzervační látky, je nearomatický
- vytváří účinnou bariéru po dobu až 96 hodin (4 dny)
- široké spektrum aplikačních forem

INDIKACE

- ochrana a prevence pokožky před podrážděním např. močí a stolicí při inkontinenci, od traumat způsobených lepidlem na fixačních prostředcích, od poškození třecí silou, např. u polohování
- lze použít ke zvýšení adheze krytí, náplastí, stomických pomůcek na neporušenou i macerovanou pokožku
- k ochraně okolí chronických ran před macerací, lze použít i na macerovanou kůži
- ošetření akutních ran (drobná řezná poranění, odřeniny, sutury)
- ošetření ran po vytažení stehů

K DISPOZICI VE 3 STERILNÍCH FORMÁCH:

- **sprej** – praktické a snadné použití, každou lahvičku lze v průměru použít na 235 aplikací
- **tampon** – díky aplikátoru je zajištěna čistá a přesná aplikace
- **ubrousek** – nákladově efektivní forma



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66800710	Secura Sprej 28 ml		1 ks	ks
66800711	Secura TampOn, 3 ml		50 ks	bal
66800712	Secura Ubrousek, 1 ml	3 x 6,5 cm	50 ks	bal
59450425	Secura Extra Ochranný krém		1 ks	ks

SKIN-PREP[◇]

Ubrousky pro ochranu pokožky s izopropylalkoholem.
Vytvářejí jemný film, který chrání pokožku.

- zlepšuje přilnavost krytí, náplastí, stomických pomůcek
- vytváří ochranný prodyšný film
- podporuje atraumatickou výměnu krytí
- prevence poškození kůže při odstraňování adhezivních krytí
- ideální k použití na problematických místech: paty, kolena, lokty
- snadné odstranění za použití prostředku na čištění pokožky nebo mýdla a vody

INDIKACE

- ochrana pokožky při použití náplastí, krytí, stomických pomůcek
- ochrana okolí ran před macerací

APLIKACE

Vyjměte z obalu a potřete pokožku. Nechte lehce zavadnout a případně aplikujte další krytí, náplast či stomickou pomůcku. Odstraňujte prostředkem PROSHIELD FOAM & SPRAY nebo použijte čisticí ubrousek REMOVE, případně vodu s mýdlem.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
59420425	SKIN PREP ubrousek pro ochranu pokožky	6 x 6 cm	50 ks	bal

REMOVE[◇]

Univerzální čisticí ubrousky se zvlhčující aloe a izoparafínem pro jemné odstraňování adhezivních krytí a zbytků náplastí.

INDIKACE

- k šetrnému odstranění náplastí, krytí, stomických pomůcek
- k ošetření pokožky
- k odstranění náplastí u novorozenců a pacientů s pergamenovou kůží
- nedráždivé, nealergizující
- k odstranění bariérových sprejů a tekutých obvazů (Secura, Opsite sprej)

APLIKACE

Vyjměte z obalu, lehce nadzvedněte okraj náplasti či krytí a jemně potírejte. Postup opakujte až do úplného odstranění krytí, náplasti či stomické pomůcky. Pokožku opláchněte, osušte a aplikujte nové krytí či stomickou pomůcku.



Kód	Popis produktu	Balení	Prodejní jednotka
59403125	REMOVE	7 x 3 cm 50 ks	bal

Hydrochirurgie

VERSAJET[◇] II

Hydrochirurgický systém.

Hydrochirurgický systém slouží k debridementu rány (čerstvé nebo chronické či popáleniny), k debridementu měkkých tkání a k čištění operačního místa v případech, které podle posouzení lékaře vyžadují chirurgické odstranění tkáně a pulzní výplach.

- zachovává živou tkáň a redukuje procedury chirurgického debridementu rány
- vytváří hladkou spodinu rány
- ničí bakterie a tím snižuje riziko infekce
- odstraňuje nečistoty a neživou tkáň při zachování živé tkáně
- snižuje bakteriální zátěž
- uchovává životaschopnou tkáň
- odstraní nežádoucí nekrózu a nečistoty
- minimální poškození periferních tkání
- zkrácená doba hojení oproti běžným metodám
- snížené náklady na léčbu

INDIKACE

- dekubity, ulcerace, popáleniny
- nehojící se rány



Kód	Popis produktu	Rozměr	Prodejní jednotka
66800039	VERSAJET II konzole (obsahuje pedál, síťový kabel a příručku uživatele)		ks
66801063	VERSAJET II Speed Stick (nástroj pro testování počtu otáček za minutu)		ks
66800040	VERSAJET II Pracovní nástroj na jedno použití Exact	Exact 15°/14 mm	ks
66800041	VERSAJET II Pracovní nástroj na jedno použití Exact	Exact 45°/14 mm	ks
66800042	VERSAJET II Pracovní nástroj na jedno použití Exact	Exact 45°/8 mm	ks
66800043	VERSAJET II Pracovní nástroj na jedno použití Plus	Plus 15°/14 mm	ks
66800044	VERSAJET II Pracovní nástroj na jedno použití Plus	Plus 45°/14 mm	ks
66800045	VERSAJET II Pracovní nástroj na jedno použití Plus	Plus 45°/8 mm	ks
66800979	VERSAJET – Chirurgický vozík		ks
66800472	VERSAJET – Multifunkční pedál		ks

Podtlaková terapie

PICO[◇] 7/14

Jednorázová pomůcka k léčbě rány podtlakem. Snadno použitelný systém, který je přínosem na operačním sále, na oddělení nebo doma.

Každá souprava obsahuje: přístroj PICO, 2 sterilní krytí, bezpečnostní pásky, 2 AA lithiové baterie.

- efektivní práce se sekretem bez objemných nádržek
- unikátní design který se pohodlně nosí a vyvíjí podtlak na spodinu rány
- systém, který umožňuje mobilitu pacienta, zlepšuje kvalitu života pacienta
- málo objemná pumpa, krytí použitelné 7 – 14 dní – v nemocnici nebo v domácím prostředí
- jednoduchá technologie podtlaku ovládaná jedním tlačítkem

INDIKACE

- akutní rány
- subakutní rány
- chronické rány
- kožní štěpy
- popáleniny
- chirurgicky uzavřené incize
- traumatické rány
- ulcerace



Systém PICO 7/14 se skládá z čerpadla, svinuté prodlužovací trubičky, baterií, sterilního krytí a připevňovacích pásků. Čerpadlo PICO 7/14 zajišťuje vakuové ošetření ran (NPWT) při podtlaku o hodnotě 80 mm Hg (nominální) na povrchu rány. Krytí se o exsudát postará kombinací absorpce a odpařování vlhkosti přes vnější film. Systém PICO 7/14 je určen k použití po dobu až 14 dní. Krytí PICO typu Soft Port je zkonstruováno se zabudovaným filtrem, který zabraňuje vniknutí tekutiny do trubičky Soft Port a do čerpadla Pico. Za rány s malou exudací jsou považovány rány s 0,6 g tekutého exsudátu/cm² plochy rány/24 hodin. Za rány se střední exudací jsou považovány rány s až 1,1 g tekutého exsudátu/cm² plochy rány/24 hodin. 1 g exsudátu odpovídá přibližně 1 ml exsudátu. Frekvenci výměn krytí mohou ovlivnit různé faktory, například druh rány, velikost rány, rychlost vytékání nebo objem exsudátu, orientace nebo podmínky prostředí. Další krytí lze zakoupit samostatně podle potřeby. Krytí PICO typu Soft Port je zkonstruováno se zabudovaným filtrem, který zabraňuje vniknutí tekutiny do hadičky Soft Portu a do čerpadla Pico.

Měla by být podniknuta preventivní opatření u níže uvedených typů pacientů, u nichž je vysoké riziko krvácivých komplikací:

- pacienti, kterým je poskytována léčba za použití antikoagulantů nebo inhibitorů agregace trombocytů
- pacienti, kteří mají oslabené cévy či orgány v ráně nebo jejím okolí mimo jiné z důvodu anastomóz, infekce, traumatu či ozáření.
- pacienti, kteří trpí obtížnou hemostázou ran
- pacienti, u nichž je neléčená podvýživa
- pacienti, kteří neposлуouchají pokyny lékaře nebo vykazují známky agresivního chování
- pacienti, kteří mají rány v těsné blízkosti cév nebo jemné pojivové tkáně
- pokud se při použití objeví bolest, zarudnutí, zápach, zvýšení citlivosti nebo náhlá změna objemu či barvy tekutiny z rány, ihned se obraťte na svého zdravotníka



Kód	Popis produktu	Rozměr	Balení	Prodejní jednotka
66802040	PICO Multisite small	15 x 20 cm, savá plocha 10 x 15 cm	5 ks	ks
66802041	PICO Multisite large	20 x 25 cm, savá plocha 15 x 20 cm	12 ks	ks
66802042	PICO with Soft Port	10 x 20 cm, savá plocha 5,6 x 15 cm	5 ks	ks
66802043	PICO with Soft Port	10 x 30 cm, savá plocha 5,6 x 25 cm	12 ks	ks
66802044	PICO with Soft Port	10 x 40 cm, savá plocha 5,6 x 35 cm	6 ks	ks
66802045	PICO with Soft Port	15 x 15 cm, savá plocha 10 x 10 cm	6 ks	ks
66802046	PICO with Soft Port	15 x 20 cm, savá plocha 10 x 15 cm	6 ks	ks
66802047	PICO with Soft Port	15 x 30 cm, savá plocha 10 x 25 cm	5 ks	ks
66802048	PICO with Soft Port	20 x 20 cm, savá plocha 15 x 15 cm	5 ks	ks
66802049	PICO with Soft Port	25 x 25 cm, savá plocha 20 x 20 cm	5 ks	ks

RENASYS[◇] EZ MAX

Přístroj pro podtlakovou terapii.

RENASYS EZ je výkonným přístrojem k podtlakové terapii podporujícím léčbu ran u hospitalizovaných nemocných.

- doporučené rozmezí podtlaku pro terapii je 40–120 mm Hg*
- používání přístroje je jednoduché a ekonomicky výhodné
- výstražná signalizace (stav baterie, naplnění kanystru, blokace, nízký podtlak a příliš vysoký podtlak)
- integrované připevňování (vysouvací háček k zavěšení na lůžka, kolečko pro připevnění na infuzní stojan)
- dostupné dva objemy kanystrů 250 ml a 800 ml



Kód	Popis produktu	Balení	Prodejní jednotka
66801309	Zařízení RENASYS EZ MAX	ks	ks

RENASYS[◇] GO

Přístroj pro podtlakovou terapii, vhodný i pro mobilní pacienty.

Přístroj pro podtlakovou terapii, vhodný i pro mobilní pacienty.

- doporučené rozmezí podtlaku pro terapii je 40–120 mm Hg*
- tichý a lehký přístroj je vybavený páskem k pověšení přes rameno, má malé rozměry (175 mm x 210 mm x 85 mm)
- matný kanystr 300 ml a 750 ml
- používání přístroje je jednoduché a ekonomicky výhodné
- výstražná signalizace (stav baterie, naplnění kanystru, blokace, nízký podtlak a příliš vysoký podtlak)
- čitelný displej
- baterie s 20 hodinovým cyklem práce
- obvazové soupravy určené k léčbě různých ran



Kód	Popis produktu	Balení	Prodejní jednotka
66801496	Zařízení RENASYS GO	ks	ks

RENASYS[®] Příslušenství

Systém NPWT Renasys EZ Max

Kanystry RENASYS EZ PLUS/MAX	
Popis produktu	Kód
RENASYS EZ 800 ml S-kanystr 10 sad v balení • Zapečetěný kanystr • Pojistka proti přetečení se silikonovou hadičkou • Připojovací hadičky	800 ml se zpevňující látkou 66800912
RENASYS EZ 250 ml S-kanystr se zpevňující látkou 5 ks v balení • Zapečetěný kanystr • Zpevňující látka • Pojistka proti přetečení se silikonovou hadičkou • Připojovací hadičky	250 ml se zpevňující látkou 66800913



Systém NPWT Renasys Go

Kanystry RENASYS GO	
Popis produktu	Kód
RENASYS GO velký kanystr 750 ml 5 ks v balení • Zapečetěný kanystr • Zpevňující látka • Připojovací hadičky	750 ml se zpevňující látkou 66800916
RENASYS GO kanystr 300 ml 5 ks v balení • Zapečetěný kanystr • Zpevňující látka • Připojovací hadičky	300 ml se zpevňující látkou 66800914



Příslušenství RENASYS EZ PLUS/MAX	
Popis produktu	Kód
RENASYS EZ přepravní pouzdro	66800587
RENASYS EZ držák kanystru	66800060

Příslušenství RENASYS	
Popis produktu	Kód
Acticoat flex 3 (antimikrobiální krytí, flexibilní polyesterová mřížka s nanokrystalickým stříbrem SILCRYST)	10 × 10 cm 12 ks v balení 66800399
	10 × 10 cm 5 ks v balení 66800398
Acticoat flex 7	5 × 5 cm 5 ks v balení 66800395
Cuticerin (acetátová neadhesivní mřížka)	7,5 × 7,5 cm 50 ks v balení 66045560
	7,5 × 20 cm 50 ks v balení 66045561



Příslušenství RENASYS GO	
Popis produktu	Kód
RENASYS GO přenosná brašna	66800162
RENASYS GO popruh k brašně	66800163
RENASYS GO pachové filtry	66800061
RENASYS GO prstence ve tvaru O	66800603
RENASYS GO přepravní pouzdro	66800586



RENASYS[®] Spotřební materiál

Pěnové sady RENASYS

Gázové sady RENASYS

Pěnové obvazy s měkkým portem

Popis produktu

Kód

RENASYS-F

Malý

- Pěnový blok
10 cm × 8 cm × 3 cm
- Transparentní film RENASYS
- Měkký port RENASYS



66800794

RENASYS-F

Střední

- Pěnový blok
20 cm × 12,5 cm × 3 cm
- 2 transparentní filmy RENASYS
- Měkký port RENASYS



66800795

RENASYS-F

Velký

- Pěnový blok
25 cm × 15 cm × 3 cm
- 3 transparentní filmy RENASYS
- Měkký port RENASYS



66800796

RENASYS-F

Extra velký – XL

- Pěnový blok
48 cm × 41 cm × 1,5 cm
- 6 transparentních filmů RENASYS
- Měkký port RENASYS



66800797

Obvazová sada na břicho

RENASYS – AB s měkkým portem

- 2 pěnové bloky
40,5 cm × 27,5 cm × 2,5 cm
- Ochranná vrstva orgánů
80 cm × 66 cm
- 6 transparentních filmů RENASYS
- Měkký port RENASYS



66800980

Pěnové obvazy s měkkým portem

Popis produktu

Kód

RENASYS-G

Malý

- Gázový obvaz AMD 15 cm × 17 cm
- Transparentní film RENASYS
- Nepřilnavá gáza RENASYS
- Měkký port RENASYS
- Ochranné ubrousky SECURA
- Solný roztok
- Papírové měřítko



66800933

RENASYS-G

Střední

- 2 gázové obvazy AMD 15 cm × 17 cm
- Transparentní film RENASYS
- Nepřilnavá gáza RENASYS
- Měkký port RENASYS
- Ochranné ubrousky SECURA
- Solný roztok
- Papírové měřítko



66800934

RENASYS-G

Velký

- Gázová role AMD 11,4 cm × 3,7 m
- 2 transparentní filmy RENASYS
- 2 nepřilnavé gázy RENASYS
- Měkký port RENASYS
- Ochranné ubrousky SECURA
- Solný roztok
- Papírové měřítko



66800935

RENASYS-G

Extra velký – XL


- 2 gázové role AMD 11,4 cm × 3,7 m
- 3 transparentní filmy RENASYS
- 4 nepřilnavé gázy RENASYS
- Měkký port RENASYS
- 2 ochranné ubrousky SECURA
- 2 solné roztoky
- Papírové měřítko



66800936

Sterilní gázový obvaz s měkkým portem


- Gázová role AMD 11,4 cm × 3,7 m
- Gázový obvaz AMD 15 cm × 17 cm
- 3 transparentní filmy RENASYS
- Měkký port RENASYS

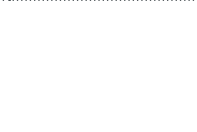

66800961

RENASYS[®] Spotřební materiál

Sady drénů RENASYS

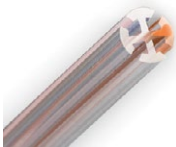RENASYS sady s drénem	
Popis produktu	Kód
Sady příslušenství k drénům 10 sad v balení 1 drén (k dispozici ve 4 uvedených konfiguracích) 1 adaptér RENASYS Quick-Click 2 voděodolné proužky - Pasta Ostomy	10Fr Kulatý drén 66801251
	
	10 mm Plochý drén 66801252
	
	15Fr Kanálkový drén 66801253
	
	19Fr Kulatý drén 66801254
	

Gázové sady s drénem	
Popis produktu	Kód
RENASYS-G Gázová obvazová sada s drénem 5 sad v balení 1 drén (k dispozici ve 4 uvedených konfiguracích) 1 adaptér RENASYS Quick-Click 1 nepřílnavá gáza 7,5 cm × 20 cm 1 gázová role Kerlix AMD 11,4 cm × 3,7 m 1 gázová houba Kerlix AMD 15 cm × 17 cm 1 transparentní film RENASYS 4 voděodolné proužky - Pasta Ostomy - ochranný ubrousek SECURA - Solný roztok - Papírové měřítko	10Fr obvazová sada kulatého drénu s gázou 66801255
	
	10Fr obvazová sada plochého drénu 10 mm s gázou 66801256
	
	15Fr obvazová sada kanálkového drénu s gázou 66801257
	
	19Fr obvazová sada kulatého drénu s gázou 66801258
	

Příslušenství RENASYS

Pěnové obvazy s měkkým portem	
Popis produktu	Kód
Transparentní film RENASYS 10 sáčků v balení 10 transparentních filmů 20 cm × 30 cm v jednom sáčku	66800394
	
Transparentní film RENASYS extra velký 10 sáčků v balení 5 transparentních filmů 38 cm × 60 cm v jednom sáčku	66800853
	
Měkký port RENASYS samostatný 5 sáčků v balení 1 měkký port v sáčku	66800799
	
Gelová náplast RENASYS 5 krabiček v balení 10 oboustranných gelových silikonových náplastí s hydrogelem 10 cm × 7 cm v jedné krabičce	66801082
	
Gázový obvaz Smith & Nephew na rány 10 sáčků v balení 5 rolí antimikrobiální gázy 1 ochranný ubrousek SECURA v sáčku	66802127
	
Pěnový obvaz na rány Smith & Nephew 5 sáčků v balení 1 pěnový blok 10 cm × 13 cm × 1,5 cm v sáčku	66801021
	
RENASYS konektor ve tvaru Y 10 sáčků v balení 1 konektor Y v sáčku	66800971
	

PROFORE[◇] Plus

Vícevrstvý kompresní obvazový systém.

Přípravek PROFORE je čtyřvrstvý systém komprese, který je podpořen rozsáhlými klinickými důkazy. Je navržen speciálně pro žilní ulcerace na nohou, poskytuje jim nezbytnou stupňovitou kompresi, aniž by během procesu hojení bylo nutné upoutání na lůžko. Kompresní bandáž Profore umožňuje pohodlí mobility, která často není možná. Obvaz obsahuje latex z přírodního kaučuku a neměl by být používán u osob, které mohou mít na materiál alergie nebo citlivost. Unikátní vícevrstvý systém má čtyři odlišné vrstvy, z nichž všechny slouží jedinečnému účelu pro hojení. První vrstva je kontaktní a slouží jako polstrování, absorbuje veškerý exsudát, který vychází během stlačování a hojení. Druhá vrstva je také absorpční a také slouží jako výplň proti kostnatým výběžkům, které mohou poškodit tkáň během komprese.

Třetí vrstva Multi-Layer Profore Compression Wrap poskytuje skutečnou kompresi. Poskytuje standardní kompresi. Je-li zapotřebí lehčí kompresní vrstva, je k dispozici také **systém Profore Lite se sníženou kompresí**.

VLASTNOSTI A VÝHODY PRODUKTU

- postupná a trvalá komprese
- poskytuje odstupňovanou kompresi
- ideální pro léčení žilních ulcerací na noze
- horní vrstva je samolepicí
- lze nosit až sedm dní
- bezpečnostní polstrování
- zkracuje dobu léčby
- pohodlné

Vícevrstvá kompresní bandáž je první volbou při léčbě ulcerací na nohou. Poskytuje přibližně tlak v hodnotě 40 mm Hg v kotníku snižující se až na 17 mm Hg u kolena.

INDIKACE

Systém vícevrstvého obvazového systému PROFORE je vhodný pro ulcerace na nohou s hodnotou Doppler ABPI větší než 0,8. PROFORE Lite je vhodný u smíšené etiologie ulcerací na nohy (které vyžadují sníženou kompresi) s hodnotou Doppler ABPI mezi 0,6 a 0,8.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nepoužívejte u pacientů s indexem kotníko-brachiálního indexu (ABI) nižším než 0,8 ani u diabetických pacientů s pokročilým onemocněním malých cév.

Pokud se u pacienta objeví bolest nebo bledé, chladné či otupělé končetiny distálně od obvazu, obvazy by měly být okamžitě odstraněny. Pokud má pacient velmi tenký kotník nebo velmi výrazný holenní hřeben, mělo by se na tyto oblasti použít další výplň, aby se zabránilo tlakové nekróze.



Kód	Popis produktu	Rozměr	Prodejní jednotka
66000015	PROFORE ANKLE DIA.	< 18 cm	ks
66000016	PROFORE ANKLE DIA.	18 – 25 cm	ks
66000017	PROFORE ANKLE DIA.	25 – 30 cm	ks
66000018	PROFORE ANKLE DIA.	> 30 cm	ks

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Novodvorská 136
142 00 Praha 4, Česká republika
Tel.: +420 221 595 111

lr@promedica-praha.cz
www.promedica-praha.cz

Smith & Nephew GmbH

Concorde Business Park 1/C/3
2320 Schwechat
Austria

www.smithnephew.at
www.smith-nephew.com

© Smith & Nephew 2015.
Trademark of Smith & Nephew.