

# Elefant<sup>®</sup>

Jednorázové odsávací a irigační zařízení  
pro laparoskopickou a robotickou chirurgii



*Určeno k řešení následujících komplikací:*




## **ELEKTROTERMICKÁ PORANĚNÍ**

Při vedení energie  
do netargetované tkáně



## **MECHANICKÁ PORANĚNÍ**

Když kanyla způsobuje  
trauma tkání nebo orgánů

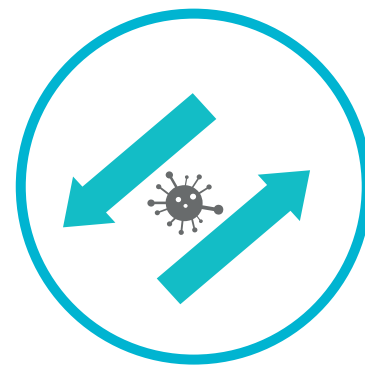

## **KŘÍŽOVÁ KONTAMINACE**

Jak čisté  
je dostatečně čisté?

# ELEFANT V AKCI

## Prostatektomie

Zařízení Elefant se používá k odsávání a k preparaci lymfatického uzlinového pole a fascie prostaty. Je také nezbytné pro odhalení hrdla močového měchýře během zákroku a disekci zadní části s extirpací semenných váčků.


Kanyla je netraumatická a nevodivá, čímž **zajišťuje čistou disekci a snižuje chirurgickou morbiditu.**



## Částečná nefrektomie

Zařízení Elefant se používá k odsávání, k vymezení exofytického nádoru, k odhalení ložiska nádoru a k disekci peritumorálního (toxického) tuku.

Kanyla je netraumatická a nevodivá. Tím **zajišťuje čistou disekci, snižuje chirurgickou morbiditu a zlepšuje viditelnost během šití a sutury, protože netraumatická špička snižuje krvácení.**

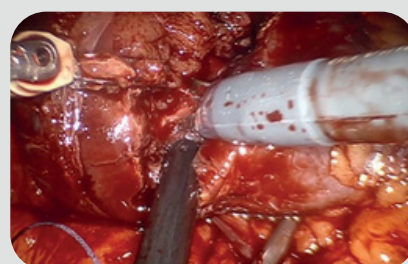

## Neoměchýř

Zařízení Elefant se používá k odsávání, preparaci uzlinového pole a k odhalení trávicí trubice.

Kanyla je netraumatická a nevodivá. Snižuje celkovou chirurgickou morbiditu a **usnadňuje konstrukci a šití neoměchýře.**



Kód	Produkt	MJ	Ks v bal
ASP145	Elefant sání/oplach bez hadic 5 mm/35 cm	ks	10
ASP150	Elefant sání/oplach bez hadic 10 mm/35 cm	ks	10
ASP180	Elefant sání/oplach bez hadic 5 mm/45 cm	ks	10
ASP165	Elefant sání/oplach s PVC hadicemi 5 mm/35 cm	ks	5
ASP170	Elefant sání/oplach s PVC hadicemi 10 mm/35 cm	ks	5
ASP185	Elefant sání/oplach s PVC hadicemi 5 mm/45 cm	ks	5

Pro více informací kontaktujte **obchodního zástupce Promedica** (výhradního distributora Coloplast v ČR) na [imiu@promedica-praha.cz](mailto:imiu@promedica-praha.cz) nebo navštivte [elefantintheroom.com](http://elefantintheroom.com).